



概览

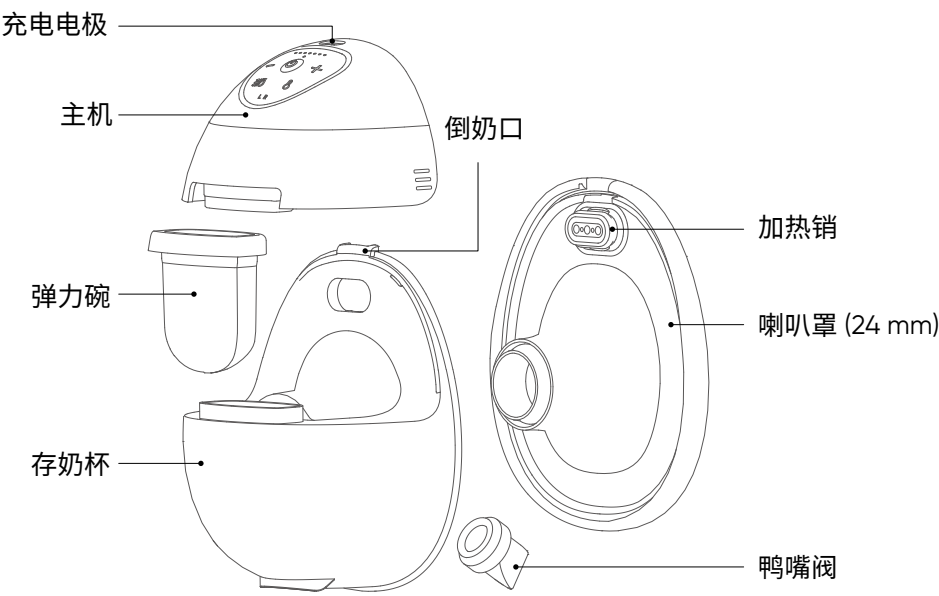


配件包含：

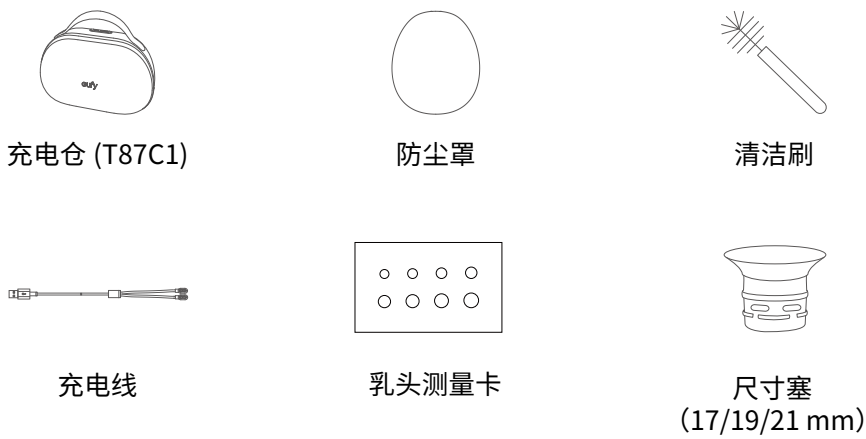


充电

首次使用前请将主机充满电；充电时主机不会工作。

选项 1：2 合 1 磁吸充电线

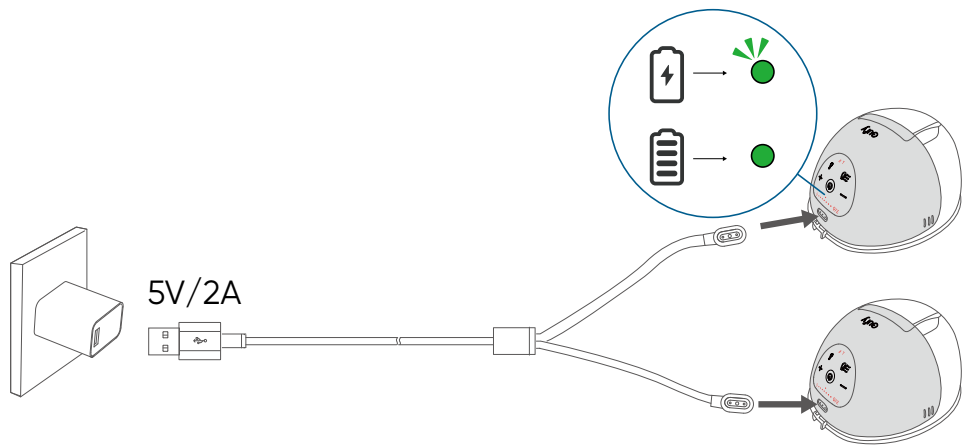

选项 2：充电仓

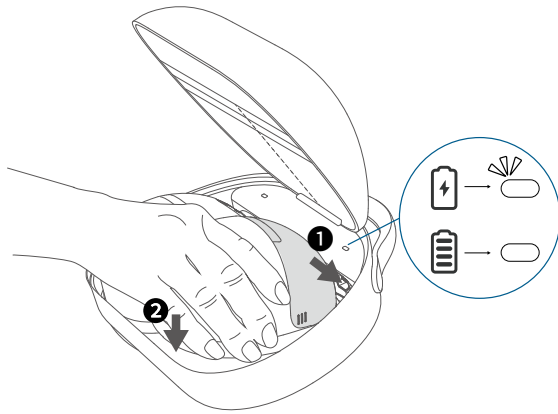

为什么充电仓或主机无法启动？


如果您遇到主机或充电仓无法工作的情况，请尝试以下步骤：

1. 长按主机上的电源键 12 秒以重置，然后再尝试开机。
2. 务必使用 5V/2A 或更高额定电流的适配器。
3. 调整或交换吸奶器的位置以确保接触良好。
4. 使用随附的磁吸充电线进行直充。


拆卸

第一步：用一只手握住主机，然后用另一只手的拇指将倒奶口附近的奶瓶边缘向外拉，使主机从倒奶口脱离。（切勿拉喇叭罩。）


第二步：提起主机。

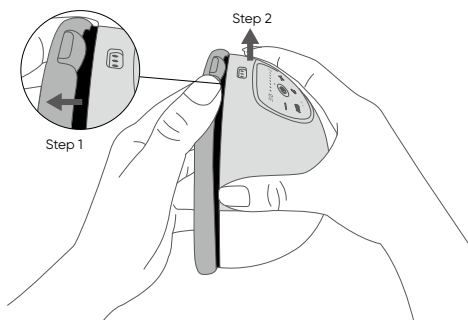


2. 从凹槽中取出弹力碗。

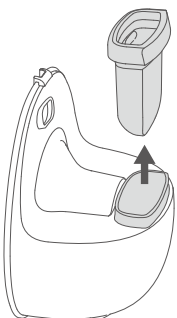

3. 打开喇叭罩外圈，将加热线从椭圆形凹槽中拉出，然后将整个喇叭罩拉出。

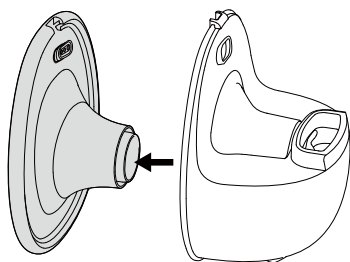

4. 用手指轻弹鸭嘴阀即可取下。

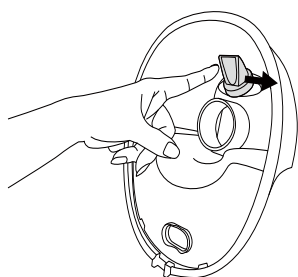

清洗和消毒



- 首次使用前：将所有可洗部件煮沸消毒，最长 5 分钟，且需不断搅拌，以防止部件粘住或溶化。亦可选择用蒸汽消毒，最长 5 分钟。
- 日常清洁：用温水冲洗所有可洗部件，然后晾干。如有必要，可用首次使用前的方式消毒。
- 可洗部件的使用寿命：预期使用寿命为 1-3 个月，实际使用寿命因使用和消毒频率而异。如果发现吸力和性能下降（尤其是鸭嘴阀），或因为下一个新生儿准备而存放太久，请更换新的可洗部件。


请勿使用微波炉消毒。



所有可洗部件（主机除外）均可按以下方式进行消毒。

⚠️ 每次吸奶过程后请务必保持主机干燥且干净。如有乳汁不慎洒在主机上，请用干布擦拭干净，以确保正常充电。

洗碗机

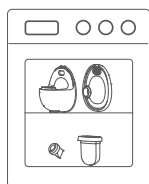

烹饪锅




婴儿奶瓶消毒器




组装


1. 握住奶杯底部朝上，用拇指和食指将鸭嘴阀塞入存奶杯内的小孔并轻弹，确保其不会掉出来。

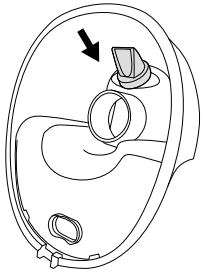


2. 将喇叭罩推到存奶杯上，确保加热销牢固并完全推入椭圆形凹槽内。裹紧外圈以确保密封严实，防止漏奶。

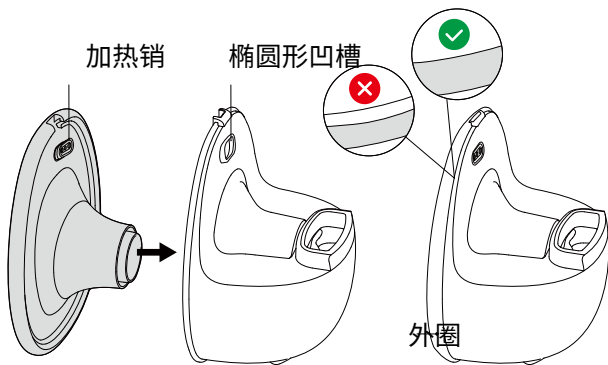


3. 用力按压加热销背面使其完全伸展。加热销接触不良可能会导致无法加热。

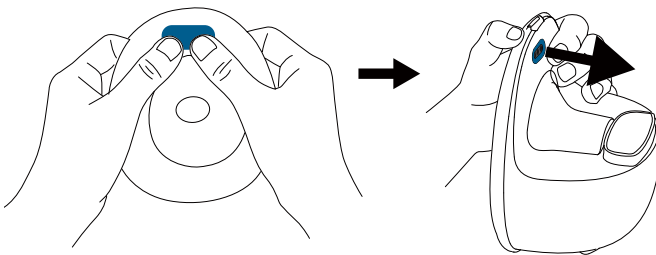

4. 将弹力碗装入存奶杯的凹槽中，弹力碗凹面朝向喇叭罩一侧。

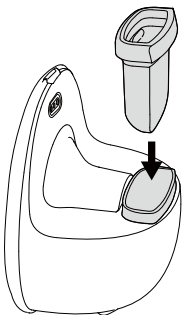


5. 将主机安装在存奶杯顶部，用力按压，确保主机和弹力碗之间没有空隙。

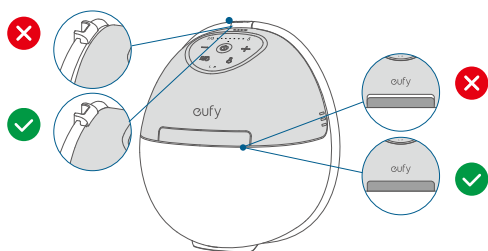

 主机和倒奶口之间的锁扣确保可靠的吸力和加热。

6. 为确保穿戴合适，请用乳头测量卡帮助您选择合适的尺寸塞，并将尺寸塞放入喇叭罩通道中。

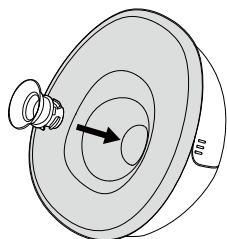

佩戴




两个标准帮助您确定吸奶器是否佩戴到位：

- 是否感觉到明显的吸力可吸出乳汁；
- 佩戴是否舒适。


如果不符合以上两个标准，则需调整吸奶器的佩戴位置。

您的身体需要一点时间来适应新的吸奶器，因此如果最初效果不佳，请不要灰心。

1. 稍微前倾，确保乳头位于喇叭罩通道的中心。吸奶器应紧贴乳房。

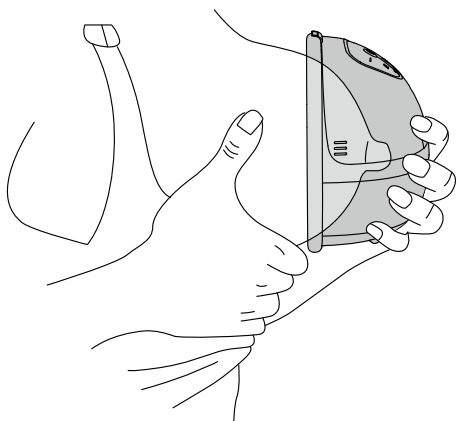

2. 使用带翻盖搭扣的全覆盖式哺乳文胸，使乳房和喇叭罩紧密贴合。

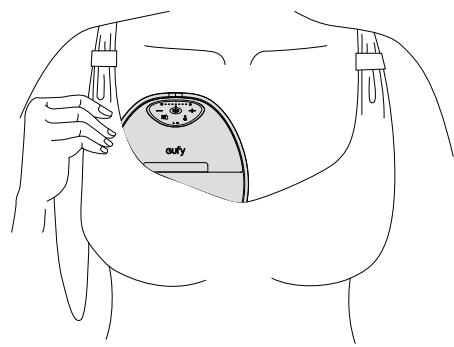

使用



为防止漏奶：

- 组装完成后，再次检查喇叭罩的外圈是否完全密封。
- 确保乳头位于喇叭罩通道的中心，并使用全覆盖型哺乳文胸使乳房紧密贴合在喇叭罩上。
- 吸奶时请勿向后倾斜。结束吸奶后，前倾身体取下吸奶器。

感觉不到吸力或者输出量偏少甚至为零？

- 检查鸭嘴阀和弹力碗是否有损毁，包括有裂缝、缺口、孔洞或撕裂。如果某个部件有损坏，请停止使用并购买替换件。
- 检查组装是否正确，以及四个部件（鸭嘴阀、喇叭罩通道、弹力碗、主机）是否完全贴合。
- 调整佩戴位置，确保乳头位于喇叭罩通道的中心，吸奶器贴合在乳房上，且可感觉到明显的吸力。
- 尝试使用不同尺寸的喇叭罩或尺寸塞。
- 尝试不同的吸力和韵律。

为确保正常加热：

- 将加热线牢固地压入椭圆形凹槽内。
- 密封主机和弹力碗之间的间隙。
- 确定最适合您的加热设定和持续时间，以免刺激皮肤。


按键操作

	长按 2 秒钟	打开 / 关闭主机 • 吸奶 30 分钟或暂停 10 分钟后，吸奶器将自动关机。
	按一下	暂停 / 继续
	按一下	在泌乳模式和吸乳模式之间切换 • 泌乳模式：在此模式下，吸奶器模拟快速、短暂的吮吸动作，让乳汁开始分泌。 • 吸乳模式：在此模式下，吸奶器模拟缓慢的吮吸动作，更深但更慢。
	按一下	打开 / 关闭加热
	按一下	增加 / 减少吸力 / 加热水平 (若要调节加热等级，请先按加热键。)
	同时按住 2 秒	在 APP 中左 / 右配对中

灯光指引		
..... •	红灯常亮	电量 <20%
	红灯闪烁	电量 <10%
≈/0	白色	处于泌乳 / 吸乳模式
⌚	橙色灯常亮	处于加热模式
	橙色灯闪烁	加热异常
.....	1 至 7 白灯 / 橙色灯	吸力 / 加热等级：1 至 7
L R	L/R 白灯	在 APP 中左 / 右已配对


倒奶

1. 暂停或关机。取出吸奶器时身体前倾，防止漏奶。

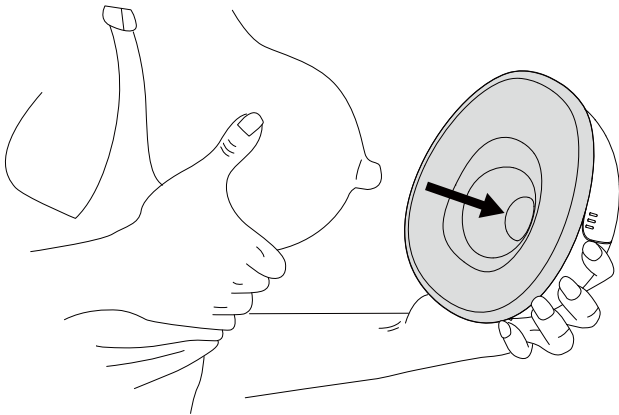


2. 从存奶杯上取出主机。参阅“拆卸”步骤 1。


⚠ 倒奶前，切勿拆卸除主机以外的任何部件（包括弹力碗），以防漏奶。

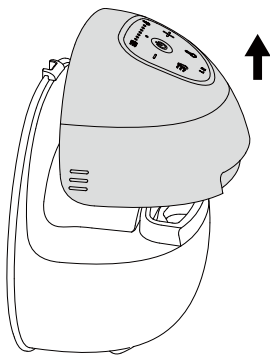

3. 将存奶杯放在桌子上，准备倒奶。

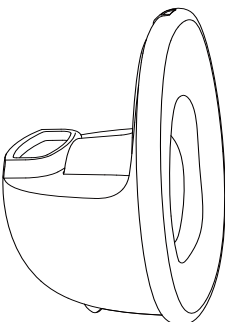

4. 将存奶杯倾斜，喇叭罩朝上，以倒出母乳。当倒奶口朝下时，进一步倾斜以完全排空。最后，如果需要，请取下弹力碗以收集其下方的任何残留母乳。

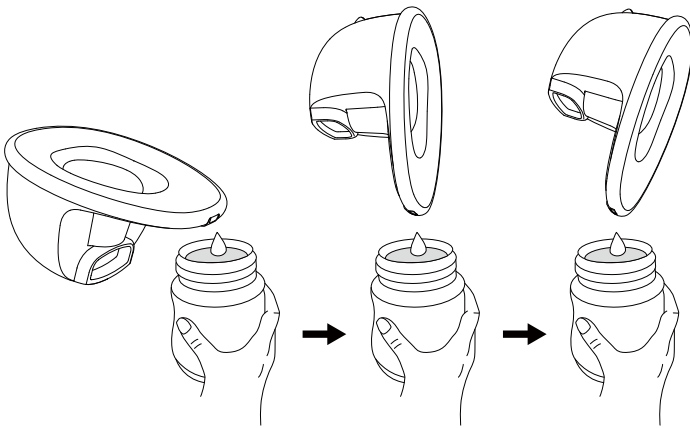

下载 APP（可选）

下载并安装 eufy Baby APP，然后登录或创建帐户。按照 APP 的说明绑定此设备并完成设置。



重要安全措施

使用电子产品时，尤其是有儿童在场的情况下，应始终遵循基本的安全预防措施，具体包括以下内容：

使用前请阅读所有说明指引

危险

为降低触电风险：

- 请勿在洗澡时使用。
- 请勿将产品放置或存放在容易掉入浴缸或水槽的地方。
- 请勿将产品放入或掉入水或其他液体中。
- 请勿伸手去拿掉入水中的产品。应立即拔下插头。
- 使用前，务必拔掉充电器。

警告

为降低烧伤、触电、火灾或人身伤害的风险。

- 按本手册中所述的预期用途使用本产品。请勿使用制造商未推荐的配件。
- 如果出现电线或插头损坏、无法正常工作、掉落或损坏、或掉入水中，切勿操作本产品。将产品送回服务中心进行检查和维修。
- 电源线应远离受热表面。
- 切勿在睡觉或昏昏欲睡时使用。
- 切勿将任何物体掉入或插入任何开口处或管口处。
- 切勿在户外使用、切勿在使用气雾剂（喷雾）产品或输氧的场所使用。
- 本品是私人使用的个人护理产品，不可多人共享。
- 如果出现皮肤刺激或不适，请用手指拨开喇叭罩和乳房组织之间的密封部位，停止使用并咨询医疗保健人士。
- 不要改装产品。
- 本品并非玩具，请将其放在儿童无法触碰的地方。
- 请勿佩戴和使用本品超过 35 分钟。请咨询医疗保健人士了解单次吸乳时长信息。
- 请勿清洗或消毒主机。仅可用干净的湿布擦拭。
- 请勿将本品放入冰箱或冰柜中。切勿使用微波炉。

- 每次蒸煮存奶杯和其它硅胶部件不得超过 5 分钟。
- 请勿在过热或过冷的环境中使用本品，切勿将产品暴露在强烈的阳光或潮湿的环境中。
- 本品及其配件的适用温度为 0° C-40° C。
- 建议在温度为 5° C-25° C 的环境中为设备充电。
- 可洗部件的预期使用寿命为 1-3 个月。建议在长期存放后或准备为下一个新生儿吸奶之前更换所有可洗部件。

妥善保存本使用说明



本产品在设计及制造中采用优质材料及部件，这些材料及部件均可回收并重复使用。



此符号表示本产品不得像生活垃圾一样丢弃，应放置到相应的收集设施，便于循环利用。正确处置和回收利用有助于保护自然资源、人类健康和环境。有关处理和回收本产品的更多信息，请联系当地相关政府部门、处置服务机构或出售本产品的门店。

警告：

更换类型不正确的电池可能会造成安全措施失效并引发危险；

如果将电池置于火中或其他强热源中，或进行压碎或切割，可能会导致爆炸以及易燃液体和气体泄漏；

如果电池周边环境温度过高，可能会导致爆炸以及易燃液体或气体泄漏。

电池在极低气压下可能发生爆炸以及出现易燃液体或气体泄漏。

注意！

如果使用错误的电池类型，则存在爆炸风险。

按照说明处理废弃电池。

保修政策

1. 三包有效期

- a. 吸奶器的三包有效期通常为 1 年。
- b. 质保期：主机保修时间为 1 年，配件质保 90 天。
- c. 包退期：自购机之日起 7 日内，若出现性能故障，消费者可选择退货、换货；自购机之日起 15 日内，若出现性能故障，消费者可选择换货。

2. 适用条件

- a. 仅适用于 非人为损坏 的性能故障（如电机故障、漏电、按键失灵等）。
- b. 消费者需提供 有效购机发票 和 三包凭证，二者缺一不可。

3. 处理流程

- a. 7 日内故障：消费者可凭发票和三包凭证选择退货、换货。若选择退货，销售方需按实际购买价格退款；换货则需提供同型号同规格新品。
- b. 8-15 日内故障：消费者可凭发票和三包凭证要求免费换货（同型号同规格新品）
- c. 16 日 -1 年内故障：销售方或厂家需提供免费修理服务，但不可再要求换货或退货。修理后，若同一故障持续两次未修复，可凭修理记录和三包凭证再次要求换货。

4. 例外情况

- a. 下列情形不享受三包服务：
 - 无法提供有效发票或三包凭证；
 - 人为损坏（如使用不当、私自拆修、改装等）；
 - 无厂名、厂址、生产日期或型号不符的产品；
 - 超过三包有效期的商品。

服务信息

Anker 的客服热线：+86 400 0550 036

Anker 的客服邮箱地址：ced-cn@anker.com

不属于保修服务范围的情形

- 产品超过三包有效期；
- 无三包凭证及有效发票，也无法证明所购产品在三包有效期内的；
- 保修凭证与产品型号标识不符或保修凭证被涂改的；
- 未按《使用说明书》要求使用、维护、保养，或使用非原厂配件造成的损坏；
- 非授权的维修、改动、误用、碰撞、跌落、挤压、进液、腐蚀；
- 撕毁、涂改或不能辨认产品标贴、封条及序列号（SN）；
- 因水灾、火灾、雷击等不可抗力造成的损坏；
- 因产品正常磨损或正常老化导致的缺陷；
- 非中国大陆销售的 Anker 产品。

有偿服务保证

因产品不符合保修条件需收取费用的，Anker 将按零部件和人工成本计算合适的维修费用，并向您提出维修报价，在征得您的同意并支付费用后为您的产品提供维修服务。

本政策严格依据《消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》制定。

保修卡

产品名称和型号：		序列号：	
用户姓名：		购买日期：	
联系电话：		收货日期：	
联系地址 (含邮编)：		发票号码：	
销售单位名称：			
销售单位地址 (含邮编)：			
销售单位电话：			

* 以上信息由销售商填写。

电子信息产品有毒有害物质清单

部件名称	有毒有害物质或元					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
橡胶	○	○	○	○	○	○
硅胶块	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
软管	○	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
印刷线路板	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○

* 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。