


## 产品概述

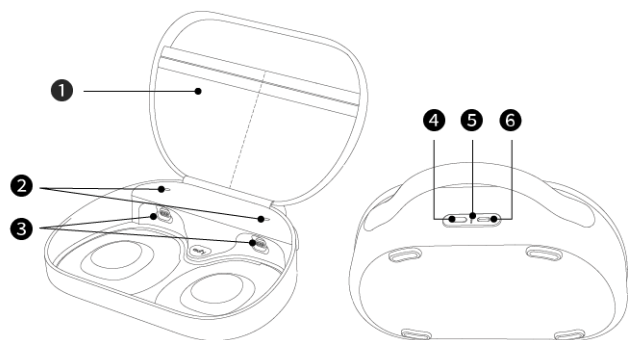

①	储物口袋
②	吸奶器充电指示灯 <ul style="list-style-type: none"><li>白灯闪烁：正在为主机充电</li><li>白灯常亮并在10分钟后熄灭：充电完成</li></ul>
③	磁吸充电接口（适用于吸奶器）
④	电量状态按钮 <ul style="list-style-type: none"><li>按下可查看充电仓的电量</li></ul>
⑤	仓体电量指示灯 <ul style="list-style-type: none"><li>1个指示灯常亮白灯：电量 &lt; 25%</li><li>2个指示灯常亮白灯：电量 25%—50%</li><li>3个指示灯常亮白灯：电量 50%—75%</li><li>4个指示灯常亮白灯：电量 &gt; 75%</li></ul>
⑥	USB-C充电接口（适用于充电仓）

## 充电


### 为充电仓充电

使用标准USB-C充电线（随附）为充电仓充电。如需查看充电仓的电量，请按下仓体电量状态按钮。

仅为充电仓充满电	3.2 小时
为充电仓及仓内两个吸奶器充满电	5小时


 充电仓和吸奶器均充满电时，电池续航最长可达5天。

### 为吸奶器充电

 为吸奶器充电前：

- 确保所有已组装的部件干净且干燥。
- 取下吸奶器上的防尘盖。

将主机上的充电触点与仓内的磁吸充电接口对齐，然后放手，使整个主机滑入对应卡槽。您应该能听到磁吸连接器发出的咔嗒声，并看到充电指示灯白灯闪烁。当指示灯常亮（随后在10分钟后熄灭），表示吸奶器已充满电。使用充电仓为吸奶器充满电需要1.7小时。

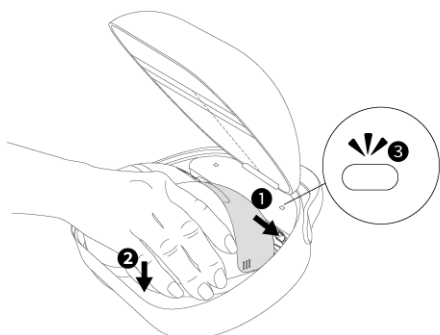


如果可清洗组件尚未清洗或未完全干燥，仍可在充电仓内为主机充电。将充电仓平放，确保吸奶器的充电触点与仓内充电接口紧密接触。



## 整理收纳

仅携带主机时，请将主机放入储物口袋，以防止在充电仓内因碰撞和摩擦造成损坏。

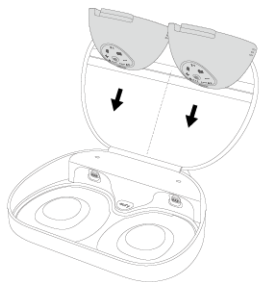

您还可以将吸奶器配件（例如电源充电线和储奶袋）放入储物口袋，以便取用。

## 清洁

充电仓不可水洗。请使用湿布擦拭仓体内外，包括磁吸充电接口。放入吸奶器前，请先在空气中晾干。