


產品概述

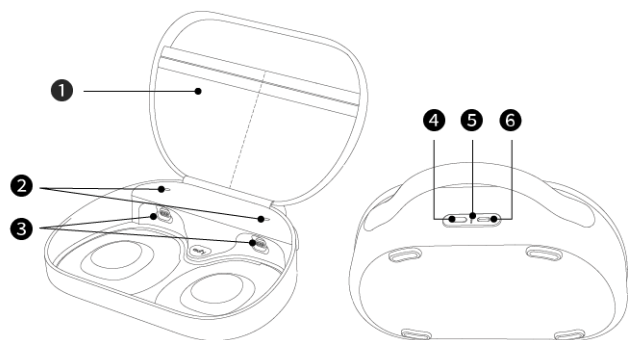

①	儲物口袋
②	吸乳器充電指示燈 <ul style="list-style-type: none">• 白燈閃爍：正在為泵體充電• 白燈常亮並在10分鐘後熄滅：充電完成
③	磁吸充電接口（適用於吸乳器）
④	電量狀態按鈕 <ul style="list-style-type: none">• 按下可查看充電倉的電量
⑤	倉體電量指示燈 <ul style="list-style-type: none">• 1個指示燈常亮白燈：電量 < 25%• 2個指示燈常亮白燈：電量 25%—50%• 3個指示燈常亮白燈：電量 50%—75%• 4個指示燈常亮白燈：電量 > 75%
⑥	USB-C充電接口（適用於充電倉）

充電


為充電倉充電

使用標準USB-C充電線（隨附）為充電倉充電。如需查看充電倉的電量，請按下倉體電量狀態按鈕。

僅為充電倉充滿電	3.2 小時
為充電倉及倉內兩個吸乳器充滿電	5小時


 充電倉和吸乳器均充滿電時，電池續航最長可達5天。

為吸乳器充電

 為吸乳器充電前：

- 確保所有已組裝的部件乾淨且乾燥。
- 取下吸乳器上的防塵蓋。

將泵體上的充電觸點與倉內的磁吸充電接口對齊，然後放手，使整個泵體滑入對應卡槽。您應該能聽到磁吸連接器發出的喀嗒聲，並看到充電指示燈白燈閃爍。當指示燈常亮（隨後在10分鐘後熄滅），表示吸乳器已充滿電。使用充電倉為吸乳器充滿電需要1.7小時。

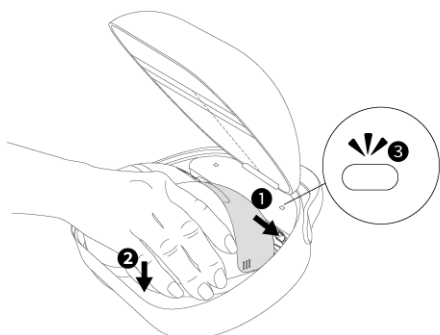


如果可清洗組件尚未清洗或未完全乾燥，仍可僅在充電倉內為泵體充電。將充電倉平放，確保吸乳器的充電觸點與倉內充電接口緊密接觸。



整理收納

僅攜帶泵體時，請將泵體放入儲物口袋，以防止在充電倉內因碰撞和摩擦造成損壞。

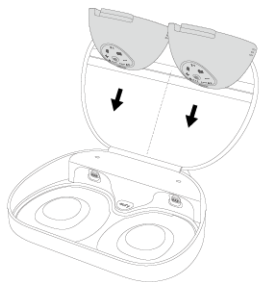

您還可以將吸乳器配件（例如電源充電線和儲奶袋）放入儲物口袋，以便取用。

清潔

充電倉不可水洗。請使用濕布擦拭倉體內外，包括磁吸充電接口。放入吸乳器前，請先在空氣中晾乾。