


Kullanım Kılavuzu


Ürün adı: eufy Taşınabilir Göğüs Pompası E20

Model: T6060


Göğüs Pompası Genel Bakış

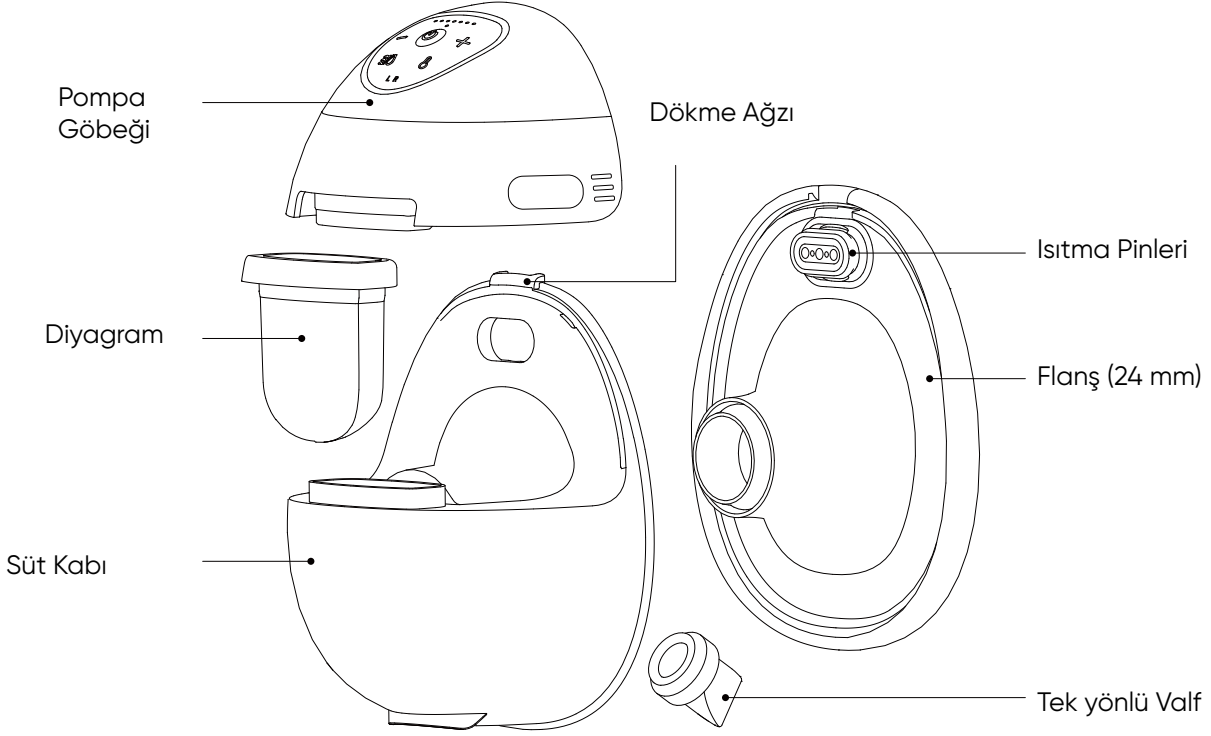

Aksesuarlar ayrıca şunları içerir:

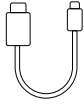

Şarj Kabloları x2

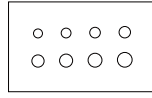

Meme Ucu Ölçüm Kartı


Şarj Etme

Göğüs pompalarınızı şarj etmek için USB-C şarj kablosu (dahil) ve 5V/1A veya daha yüksek bir adaptör (dahil değil) kullanın.



Pompa göbeğim neden açılmıyor?


Çalışmayan bir pompa göbeği ile karşılaşırsanız, sıfırlamak için pompa göbeğindeki güç düğmesini 12 saniye basılı tutun ve açılıp açılmadığını görün.

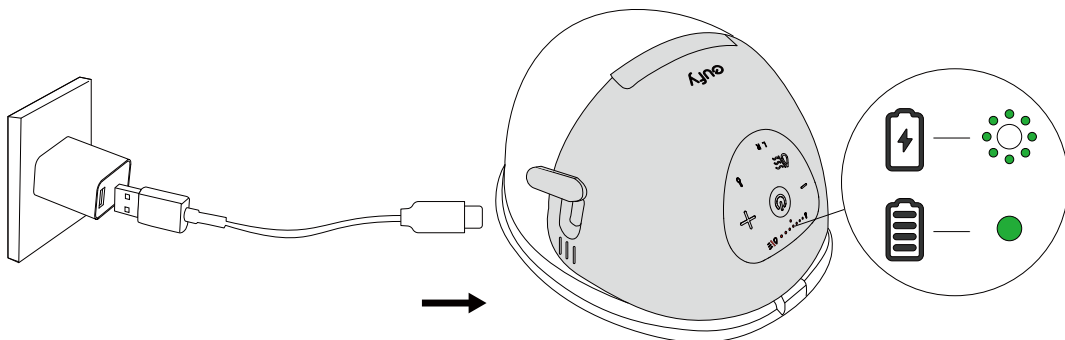


Sökme

1. **Adım 1:** Pompa göbeğini bir elinizle tutun ve diğer elinizin baş parmağını kullanarak ağza yakın kabın kenarını dışarı doğru çekerek pompa göbeğini ağızdan serbest bırakın. (Flanşı çekmemeye özen gösterin.)


Adım 2: Göbeği kaldırın.

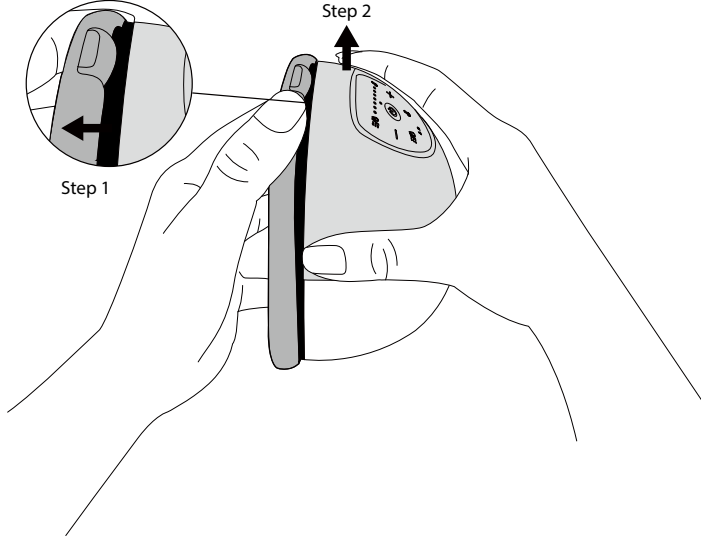


2. Diyaframı oluktan çıkarın.

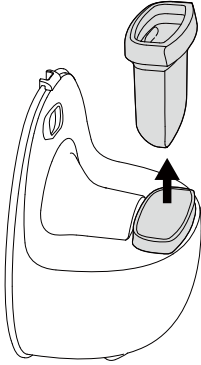

3. Flanşın dış halkasını açın, ısıtma pinlerini oval çentikten çıkarın ve ardından tüm flanşı çekip çıkarın.

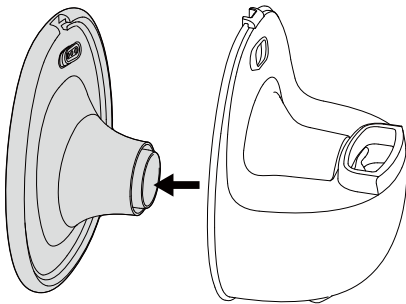

4. Tek yönlü valfi çıkarmak için parmağınızla itin

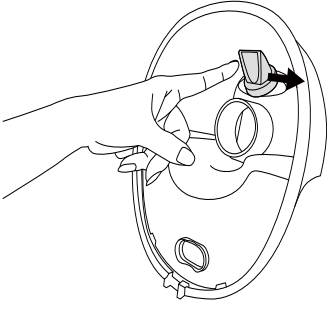

Temizleme ve Sterilize Etme



- **İlk Kullanımdan Önce:** Tüm yıkanabilir parçaları, kabın içine yapışmasını ve erimesini önlemek için sürekli karıştırarak, en fazla 5 dakika kaynatarak sterilize edin. Alternatif olarak, maksimum 5 dakika buharla sterilize edin.
- **Günlük Temizlik:** Tüm yıkanabilir parçaları ılık, sabunlu suyla durulayın, ardından hava ile kurutun. Gerekirse sterilize edin, ilk temizleme ile aynı yöntemleri kullanın.
- **Yıkanabilir parçaların ömrü:** Yıkanabilir parçaların tahmini ömrü 1-3 ay arasındadır ve gerçek ömür, kullanım ve sterilizasyon sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Emiş gücünde ve performansta bir azalma fark ederseniz (özellikle tek yönlü valf) ya da bir sonraki çocuğunuz için süt sağlamayı planlarken onları çok uzun süre sakladıysanız, değiştirin.

Sterilize etmek için mikrodalga kullanmayın.




Tüm yıkanabilir parçalar (pompa göbeği hariç) aşağıdaki gibi sterilize edilebilir.



Her pompalama seansından sonra pompa merkezini daima kuru ve temiz tutun. Pompa hubunun üzerine süt dökülürse, doğru şarj işlemini sağlamak için kuru bir bezle silerek temizleyin.


Bulaşık Makinesi

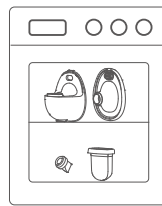

Pişirme Tenceresi




Bebek Biberon Sterilizatörü

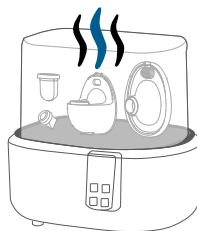


Montaj


1. Kabin altını yukarıda tutun, başparmağınız ve işaret parmağınızla tek yönlü valfi kabin içindeki küçük deliğe yerleştirin ve düşmemesi için itin.

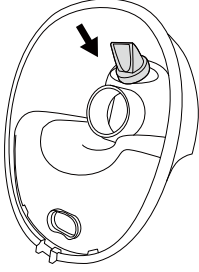


2. Flanşı kaba itin, ısıtma pinlerinin oval çentiğe sıkıca itildiğinden emin olun. Süt sızıntısını önlemek için dış halkanın doğru kapatıldığından emin olmak için sarın.

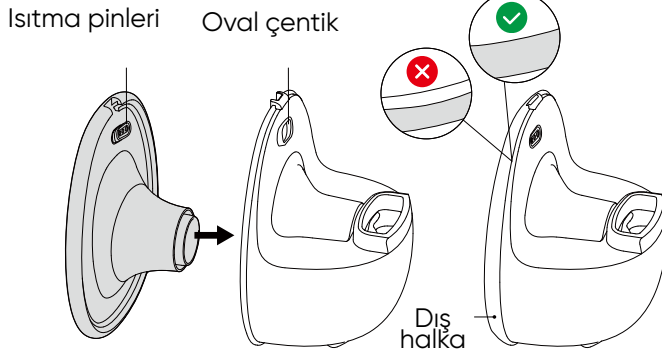


3. Tam uzatma için ısıtma pinlerinin arkasına sıkıca basın. Tam uzatılmazsa ısıtma başarısız olabilir.

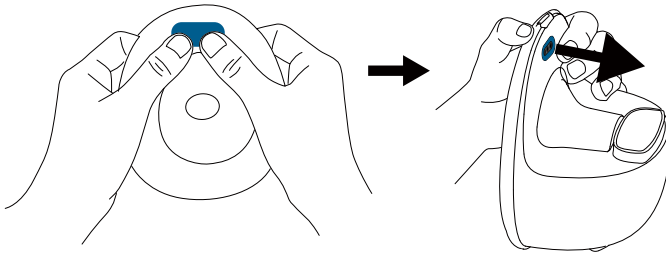

4. Diyagramı kabin oluğuna yerleştirin, diyagramın içbükey tarafı flanş tarafına bakacak şekilde.

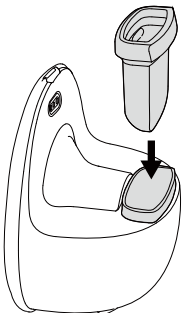


5. Pompa göbeğini kabın üstüne yerleştirin, pompa göbeği ile diyafram arasındaki boşluğu kapatmak için sıkıca bastırın.

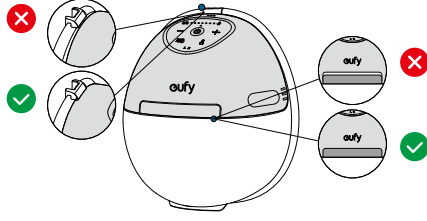

💡 Pompa göbeği ile dökme ağzı arasındaki kilit mekanizması güvenilir emiş ve ısıtma sağlar.

6. Doğru bir uyum sağlamak için Meme Ucu Ölçüm Kartını kullanarak uygun bir boyutlandırma aparatı seçin ve boyutlandırma aparatını flanş tünelinin içine yerleştirin.

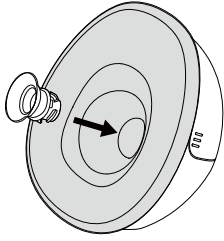

💡 Boyutlandırma aparatları ayrı olarak şu adresten satılmaktadır:
<https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>

Takma




Göğüs pompasının doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını belirlemenize yardımcı olacak iki kriter:

- Sütü çekebilecek fark edilir bir emiş hissedip hissetmediğiniz;
- Takmanın konforlu olup olmadığı.


Takma pozisyonu bu kriterlerden hiçbirini karşılamıyorsa, pompanın konumunu ayarlamanız gerekir.

Vücudunuzun yeni bir pompaya uyum sağlaması biraz zaman alır, bu yüzden en başta sonuçlar iyi değilse cesaretinizi kırmayın.

1. Meme ucunuzun flanş tüneline ortalandığından emin olmak için hafifçe öne eğilin. Göğüs pompası göğsünüze sıkıca dayanmalıdır.

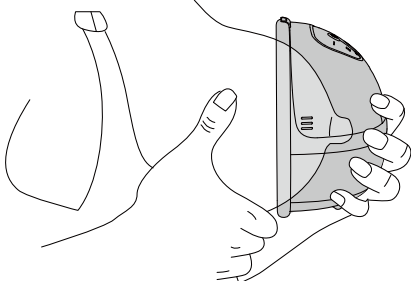

2. Göğüsleriniz ile flanş arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturmak için kapaklı tam kapsamlı bir emzirme sütyeni kullanın.

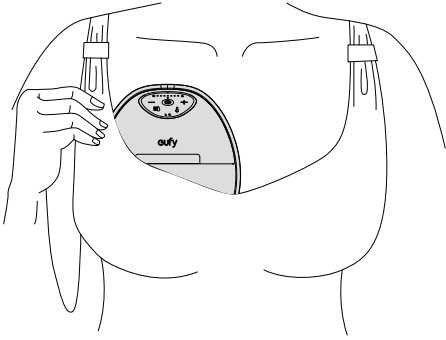

Kullanım



Sızıntıyı önlemek için:

- Montajı tamamladığınızda, flanşın dış halkasının mükemmel şekilde kapatıldığını tekrar kontrol edin.
- Meme ucunuzun flanş tüneline ortasında olduğundan emin olun ve göğüsleriniz ile flanş arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturmak için tam kapsamlı bir emzirme sütyeni kullanın.
- Sağım sırasında arkaya yaslanmayın. Seans sonunda, pompayı çıkarmak için öne eğilin.

Emiş hissetmiyor musunuz veya sıfır veya çok az çıktınız mı var?

- Tek yönlü valfi ve diyaframı çatlaklar, yongalar, delikler veya yırtıklar dahil olmak üzere hasar açısından kontrol edin. Bir parça hasarlıysa, kullanımı durdurun ve yedek parça satın alın.
- Tek yönlü valfi sağım için kullandıktan sonra kaygan olabilir.
- Takma pozisyonunu ayarlayın, meme ucunun flanş tüneline ortasında olduğundan, pompa- nın göğsünüze sıkıca oturduğundan ve fark edilir bir emiş hissettiğinizden emin olun.
- Farklı flanş veya aparat boyutlarını deneyin.
- Farklı emişleri ve ritimleri deneyin.



Doğru ısıtmayı sağlamak için:


- Isıtma pinlerini kabin oval çentiğine sıkıca basın.
- Pompa göbeği ile diyafram arasındaki boşluğu kapatın.
- Cildinizi tahriş etmeden size en uygun ısı ayarlarını ve süresini belirleyin.

Düğme Kontrolleri		
	2 Saniye Basılı Tutun	Göğüs Pompasını Aç / Kapat Göğüs pompası 30 dakika sağdıktan veya 10 dakika durakladıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.
	Basın	Duraklat / Devam Et
	Basın	Uyarı Modu ve Sağım Modu Arasında Geçiş Yap Uyarı Modu: Bu modda, göğüs pompası sütünün akmaya başlaması için hızlı ve kısa bir emme deseni ile başlar. İfade Modu: Bu modda, göğüs pompası süt sağımı için yavaş bir emme deseni ile başlar, daha derin ve daha yavaş emer.
	Basın	Isıtmayı Aç / Kapat
	Basın	Artır / Emişi Azalt / Isı Seviyesi (Isı seviyesini ayarlamak için önce ısıtma düğmesine basın.)
	Aynı Anda 2 Saniye Basılı Tutun	Uygulamada L/R Eşleştirme

Işık Kılavuzu		
	Sabit Kırmızı	Batarya Seviyesi <%20
	Yanıp Sönen Kırmızı	Batarya Seviyesi <%10
	Beyaz	Uyarı / Sağım Modunda
	Sabit Turuncu	Isıtma Modunda
	Yanıp Sönen Turuncu	Isıtma İstisnası (Isıtma pinlerinin doğru oturduğundan emin olmak için flanş ve pompa göbeğini yeniden monte edin.)
	1 ila 7 Gösterge Beyaz / Turuncu	Emiş Seviyesi: 1 ila 7 Isı Seviyesi: 1 ila 3
	L / R Göstergesi Beyaz	Uygulamada Eşleştirilmiş Sol / Sağ Taraf


Süt Aktarma

1. Göğüs pompasını duraklatın veya kapatın. Sızıntıyı önlemek için pompayı çıkarırken öne eğilin.

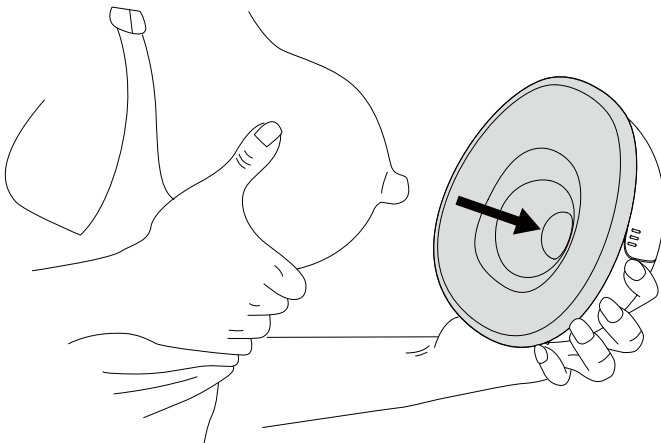


2. Pompa göbeğini kabdan çıkarın. "Sökme" bölümünün 1. adımına bakın.


⚠ Sızıntıyı önlemek için sütü aktarmadan önce pompa göbeği dışındaki parçaları (diyafram dahil) sök-
meyin.

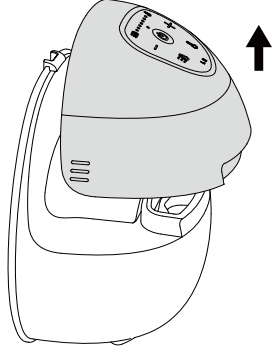

3. Aktarmaya hazır olarak kabı masada bırakın.

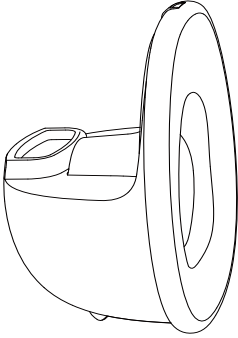

4. Sütü dökmek için flanşı yukarıda tutarak kabı eğin. Dökme ağzı aşağı baktığında, tamamen boşaltmak için daha fazla eğin. Son olarak, altındaki sıkışmış sütü toplamak için gerekirse diyaframı çıkarın.

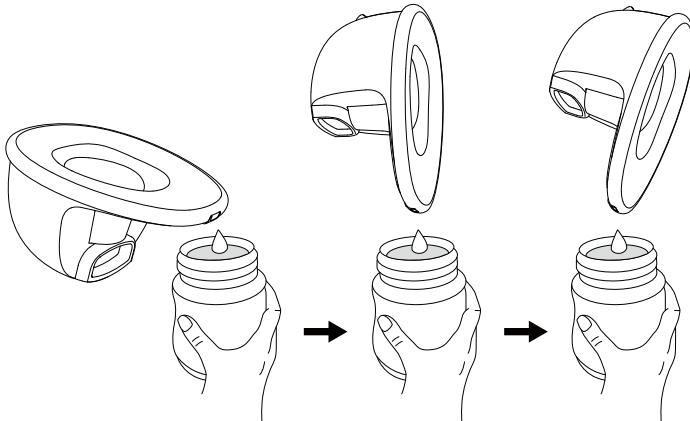

Uygulamayı İndirme (İsteğe Bağlı)

eufy Baby uygulamasını indirin ve kurun, ardından giriş yapın veya bir hesap oluşturun. Bu cihazı eklemek ve kurulumu tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
eufy ürünlerini kullanma deneyimini geliştirmek için, mevcut eufy Baby uygulaması 2025 yılında eufy uygulaması ile değiştirilecektir.



Üretici

Üretici Shenzhen TPH Technology Co., Ltd.
Adres: Room 203, 2nd floor, 29th Building, Lianchuang Technology Park,
No. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Shenzhen, Çin 518000

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



Pompa göbeği için 12 ay sınırlı garanti, Yıkanebilir parçalar için 3 ay sınırlı garanti

(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(Avustralya) +61 3 8331 4800
(Mısır) +20 8000000826
(BAE) +971 8000320817
(Kuveyt) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030



support@eufy.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial