

Kullanım Kılavuzu

Ürün adı: eufy Taşınabilir Göğüs Pompası S1 Pro

Model: T8D04

Ürün Hakkında

Kutuda Neler Var

Ürün Genel Bakış

Bir Bakışta

Düğme Kontrolleri

Işık Kılavuzu

Şarj Etme

Sökme

Temizleme ve Sterilize Etme

İlk Kullanımdan Önce

Günlük Kullanım İçin

Montaj

Takma

Ölçüm

Boyutlandırma Aparatı Kullanın (İsteğe Bağlı)

Takma

Uygulama Olmadan Kullanım

Sağım

Uyarı Modu ve Sağım Modu

eufy Baby Uygulaması ile Kullanım

Süt Aktarma

Süt Saklama

Anne Sütünü Saklama

Saklanan Sütü Besleme


Bakım

SSS

Özellikler

Üretici

Ürün Hakkında

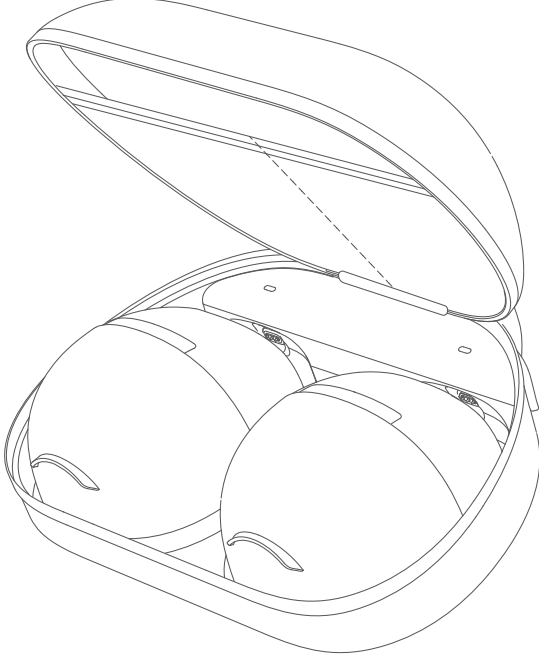

eufy Taşınabilir Göğüs Pompası Serisi, emziren kadınların göğüslerinden anne sütünü sağlamak ve toplamak için tasarlanmıştır. Göğüs pompası, eufy Baby uygulaması ile veya uygulamadan kullanılabilir; bebeğiniz için anne sütünü güvenli, verimli ve konforlu bir şekilde sağmanıza ve toplamanıza yardımcı olur.



• Bu ürün tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır.

TEHLİKE – Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- Banyo yaparken kullanmayın.
- Ürünü bir küvete veya lavaboya düşebileceği ya da çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
- Suya veya başka bir sıvıya koymayın veya düşürmeyin.
- Suya düşen bir ürüne ulaşmaya çalışmayın. Hemen fişi çekin.
- Her zaman kullanmadan önce şarj cihazının bağlantısını kesin.

UYARI – Yanık, elektrik çarpması, yangın veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için.

- Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaç doğrultusunda kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Kablosu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya hasar görmüşse veya suya düşmüşse bu ürünü asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine götürün.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Uyurken veya uykulu halde asla kullanmayın.
- Herhangi bir açıklığa veya hortuma asla bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
- Açık havada kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı ya da oksijenin verildiği yerlerde çalıştırmayın.
- Ürünü değiştirmeyin.
- Bu bir oyuncak değildir, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu, tek bir kullanıcı için tasarlanmış bir kişisel bakım ürünüdür ve kullanıcılar arasında paylaşılmalıdır.
- Eğer tahriş veya rahatsızlık olursa, flanş ile göğüs dokusu arasındaki sızdırmazlığı parmağınızla bozarak kullanımı durdurun ve bir sağlık uzmanına başvurun.
- **Ürünü 35 dakikadan fazla süreyle takmayın ve kullanmayın. Süt sağma seansında ne kadar süreyle süt sağmanız gerektiğini anlamak için sağlık uzmanınıza danışın.**
- Pompa göbeğini yıkamayın veya dezenfekte etmeyin. Yalnızca temiz ve nemli bir bezle silin.
- Göğüs pompasını buzdolabına veya dondurucuya koymayın. Mikrodalga fırın kullanmayın.
- **Süt kabını ve tüm silikon parçaları her seferinde 5 dakikadan fazla kaynatmayın.**
- Ürünü aşırı sıcak veya aşırı soğuk bir ortamda kullanmayın, ürünü asla güçlü güneş ışığına veya nemli bir ortama maruz bırakmayın.
- **Bu ürün ve aksesuarlar için uygun sıcaklık 0°C-40°C'dir.**
- Cihazı 5°C-25°C arasındaki bir sıcaklıkta bir ortamda şarj etmeniz önerilir.


Kutuda Neler Var

Ambalajı açarken, lütfen aşağıdaki tüm parçaların pakete dahil olduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksikse, lütfen **eufy Akıllı Destek Merkezi** ile iletişime geçin:

<https://support.eufy.com/s/contact-us>

Daha fazla taşınabilir göğüs pompası ve yedek parça şu adresten satın alınabilir:

<https://www.eufy.com/breast-pump>

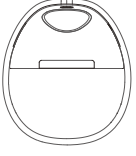


x2

Göğüs Pompaları
(24 mm Flanşlar)



x1

Şarj Kutusu

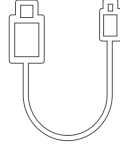

x1

USB-C
Şarj Kablosu




x1

Manyetik
Şarj Kablosu




x6

Boyutlandırma
Aparatları
(17/19/21 mm)

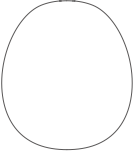


x2

Toz Kapakları

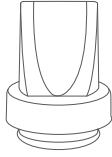


x2

Ekstra
Tek yönlü valfleri

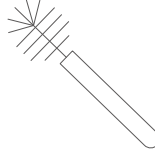

x1

Temizleme Fırçası

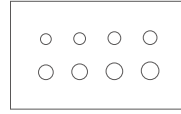

x1

Meme Ucu
Ölçüm Kartı




x1

Hızlı Başlangıç
Kılavuzu

Ürün Genel Bakış

Bir Bakışta

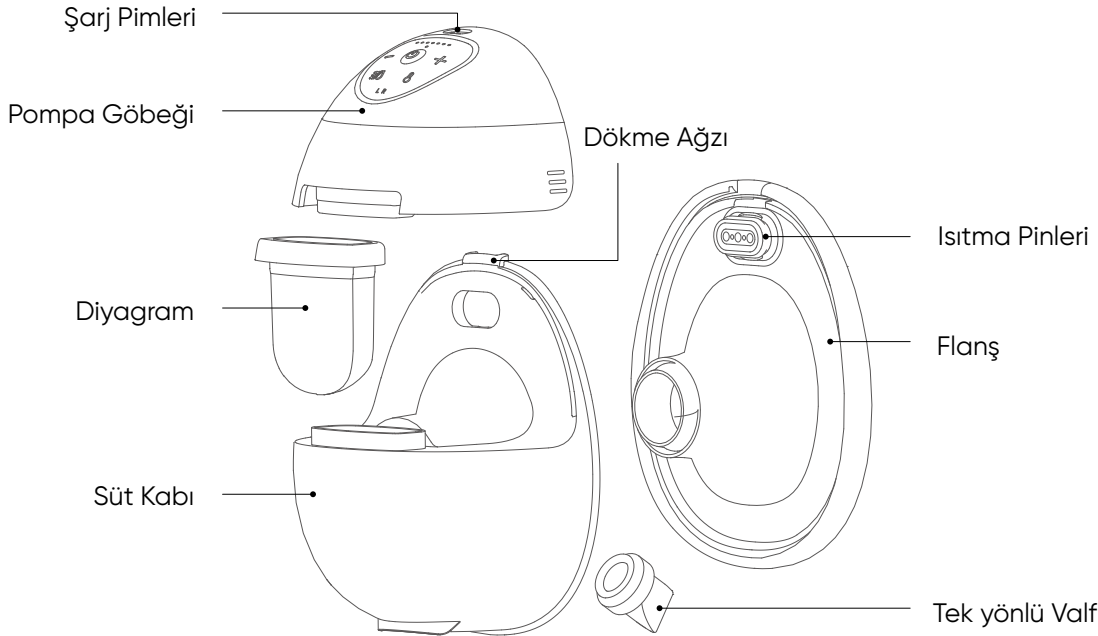

Parça	İşlev
Şarj Pimleri	Göğüs pompasını şarj etmek için manyetik şarj kablosu ile temasta.
Pompa Göbeği	Bir göğüs pompasının motoru. Ayarları kontrol edebileceğiniz bir kontrol paneline sahiptir.
Diyafram	Deformasyon yoluyla emiş oluşturan, anne sütünü pompa göbeğinden ayıran ve süt arzınızın hijyenik olmasını sağlayan bir membran.

Süt Kabı	Anne sütü toplayıcısı. Her sağım seansından sonra, kabın içinden anne sütünü dökme ağzından aktarın.
Isıtma Pinleri	Isıtma fonksiyonu için göğüs pompasının göbeği ile temasta.
Flanş	Vakum sızdırmazlığı oluşturmak için doğrudan meme ucunuza oturan silikon parça. Kendiniz için doğru flanş veya aparat boyutunu bulmak için lütfen pakete dahil edilen Meme Ucu Ölçüm Kartına veya bu kullanım kılavuzundaki ilgili "Ölçüm" bölümüne bakın.
Tek yönlü Valf	Emişi teşvik eden ve anne sütünü kaba salan bir valf.

Düğme Kontrolleri

	2 Saniye Basılı Tutun	Göğüs Pompasını Aç / Kapat (Göğüs pompası 30 dakika sağdıktan veya 10 dakika durakladıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.)
	Basın	Duraklat / Devam Et
	Basın	Uyarı Modu ve Sağım Modu Arasında Geçiş Yap Uyarı Modu : Bu modda, göğüs pompası sütünün akmaya başlaması için hızlı ve kısa bir emme deseni ile başlar. İfade Modu : Bu modda, göğüs pompası süt sağımı için yavaş bir emme deseni ile başlar, daha derin ve daha yavaş emer.
	Basın	Isıtmayı Aç / Kapat
	Basın	Artır / Emişi Azalt / Isı Seviyesi (Isı seviyesini ayarlamak için önce ısıtma düğmesine basın.)
	Aynı Anda 2 Saniye Basılı Tutun	Uygulamada L/R Eşleştirme (Önce eufy Baby uygulamasında göğüs pompalarınızı kurmanız gerekir.)

Işık Kılavuzu

	Yanıp Sönen Yeşil	Şarj Ediliyor
	Sabit Yeşil	Şarj Tamamlandı
	Sabit Kırmızı	Batarya Seviyesi <%20
	Yanıp Sönen Kırmızı	Batarya Seviyesi <%10
	Beyaz	Uyarı / Sağım Modunda
	Sabit Turuncu	Isıtma Modunda
	Yanıp Sönen Turuncu	Isıtma İstisnası (Isıtma pinlerinin doğru oturduğundan emin olmak için flanş ve pompa göbeğini yeniden monte edin.)
	1 ila 7 Gösterge Sabit Beyaz	Emiş / Isı Seviyesi: 1 ila 7
	Yanıp Sönen Beyaz	Bekleme Modunda (Göğüs pompası açıldıktan sonra bekleme moduna geçer. Devam etmek için güç düğmesine basmadan önce sol veya sağ tarafı onaylayın ve emiş seviyesini ayarlayın.)

L R	L / R Göstergesi Sırayla Yanıp Söner	Uygulamada Sol / Sağ Taraf Eşleştirmesi
	L / R Göstergesi Beyaz	Uygulamada Eşleştirilmiş Sol / Sağ Taraf



- Varsayılan olarak, gösterge ışıkları 10 saniyelik hareketsizlikten sonra kapanır. Bu süre eufy Baby uygulamasında değiştirilebilir.
- Gösterge ışıkları yandığında, düğmelere basmak ilgili eylemleri hemen gerçekleştirir. Göstergeler kapalıyken, uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın ve ardından ilgili eylemler için düğmelere basın.

Şarj Etme

https://youtu.be/X_mkD0XHY0c


Before initial use, fully charge your breast pumps fully, which can last up to 2 days.



Göğüs pompanız şarj cihazıyla şarj ederken çalışmıyor. Şarj sırasında göğüs pompalarını takmayın.


Seçenek 1:

Göğüs pompalarınızı şarj etmek için manyetik şarj kablosu (dahil) ve 5V/1A veya daha yüksek bir adaptör (dahil değil) kullanın.

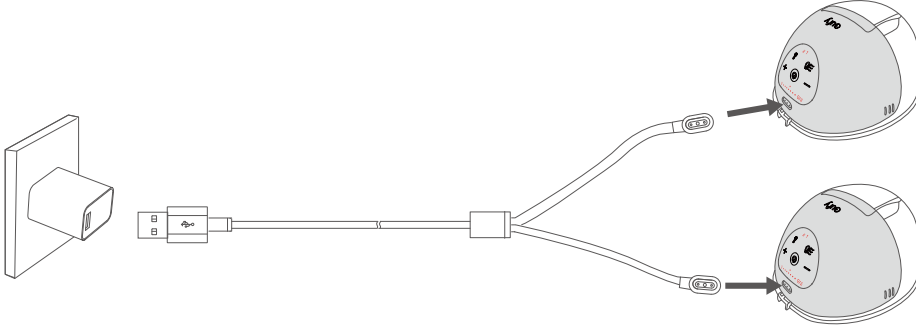

Seçenek 2:

Göğüs pompalarını şarj etmek için şarj kutusunu (dahil) kullanın. Şarj kutusunun nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar için [eufy Göğüs Pompası Şarj Kutusu Kullanım Kılavuzuna](#) bakın.

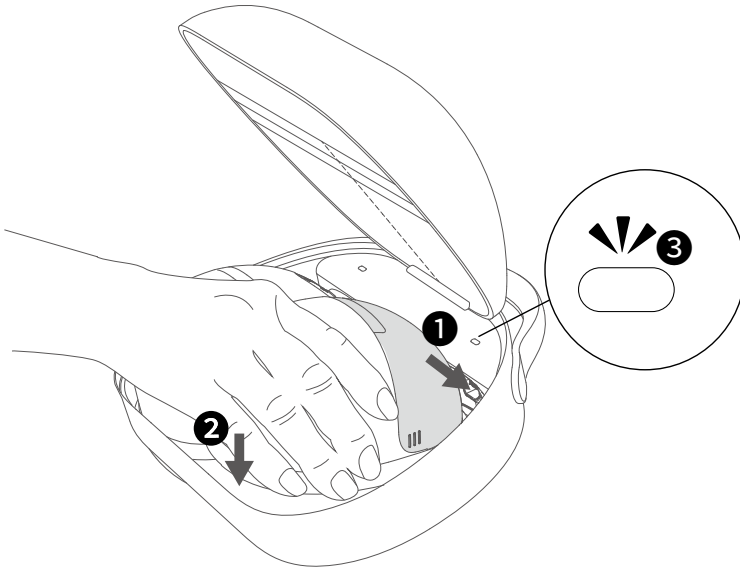


Sökme

<https://youtu.be/88AqHUD2nhY>


İlk kullanımda veya her kullanımdan sonra, pompaları ayrı ayrı temizlenebilen veya sterilize edilebilen parçalara sökün.

1. **Adım 1** : Pompa göbeğini bir elinizle tutun ve diğer elinizin baş parmağını kullanarak ağza yakın kabın kenarını dışarı doğru çekerek pompa göbeğini ağızdan serbest bırakın. (Flanşı çekmemeye özen gösterin.) **Adım 2**: Göbeği kaldırın.

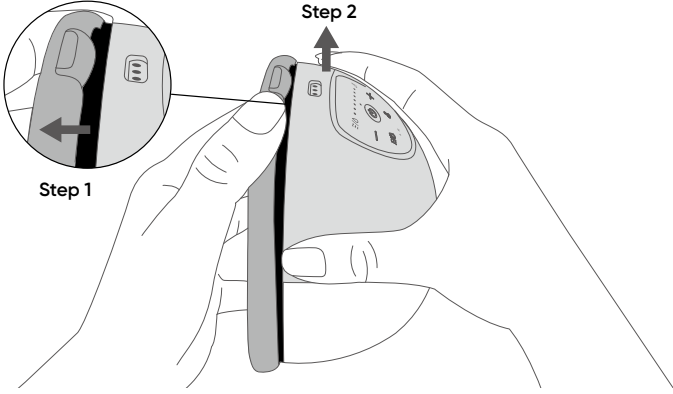


• Pompa göbeği ile dökme ağzı arasındaki kilit mekanizması güvenilir emiş ve ısıtma sağlar.


2. Diyaframı oluktan çıkarın.

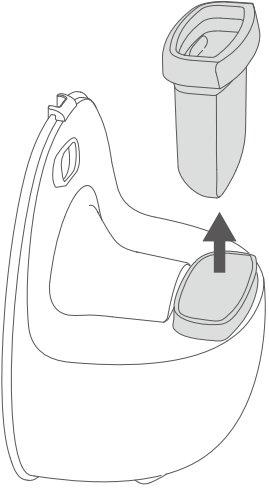

3. Flanşın dış halkasını açın, ısıtma pinlerini oval çentikten çıkarın ve ardından tüm flanşı çekip çıkarın.

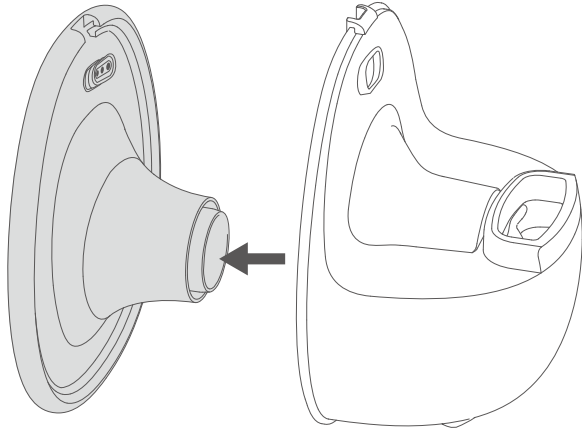

4. Tek yönlü valfi çıkarmak için parnağınızla itin

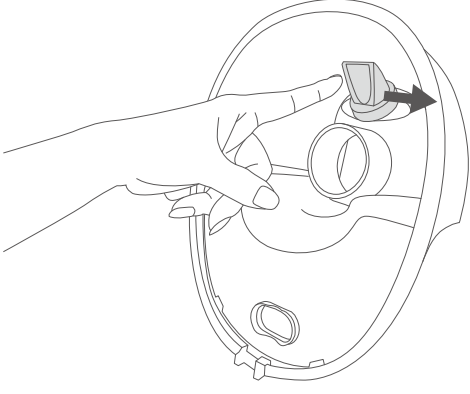

- Tek yönlü valf sağım için kullanıldıktan sonra kaygan olabilir. Tek yönlü valfi itmek onu daha kolay hareket ettirmenize yardımcı olur.

Temizleme ve Sterilize Etme


https://youtu.be/lklQ_H89qrA



- Pompa göbeği dışındaki tüm bileşenler yıkanabilir. Pompa göbeğini dezenfektan mendillerle temizleyin.
- Sağlanan temiz fırçayı kullanarak bebek besleme eşyalarını ovalayın.
- Tüm parçaları manuel olarak temizleyin. Temizlemek için bulaşık makinesi kullanmayın.
- Sterilize etmek için mikrodalga kullanmayın. Yüksek sıcaklıklar ömrü kısaltır ve güvenlik tehlikelerine neden olur.
- Temizleme ve sterilize ettikten sonra tüm parçaları iyice hava ile kurutun.

İlk Kullanımdan Önce

Tüm yıkanabilir parçaları 5 dakikaya kadar kaynatarak sterilize edin, parçaların kaba yapışmasını ve erimesini önlemek için sürekli karıştırın. Alternatif olarak, maksimum 5 dakika buharla sterilize edin. Ardından temiz maşa kullanarak çıkarın.

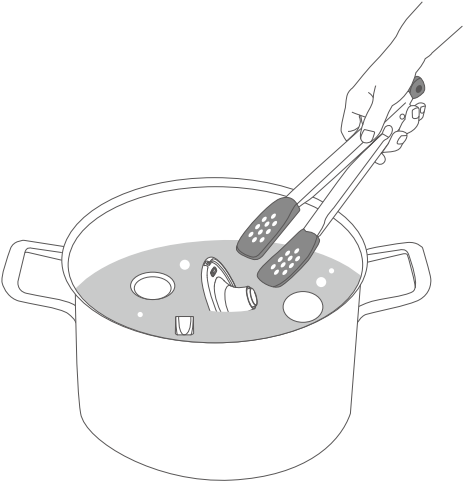

Günlük Kullanım İçin

Tüm yıkanabilir parçaları ılık, sabunlu suyla durulayın, ardından hava ile kurutun. Gerekirse sterilize edin, ilk temizleme ile aynı yöntemleri kullanın.




Montaj


<https://youtu.be/UchwqZQrDIU>

 Montaja başlamadan önce, ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkadığınızdan emin olun.


1. Kabin altını yukarıda tutun, başparmağınız ve işaret parmağınızla tek yönlü valfi kabin içindeki küçük deliğe yerleştirin ve düşmemesi için itin.

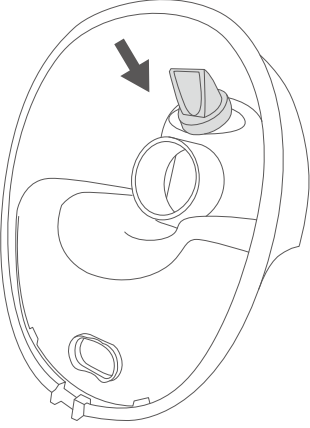


2. Flanş tüneline kabin üzerine itin, ısıtma pinlerinin oval çentikine sıkıca itildiğinden emin olun. Süt sızıntısını önlemek için dış halkanın doğru monte edildiğinden emin olmak için sarın.

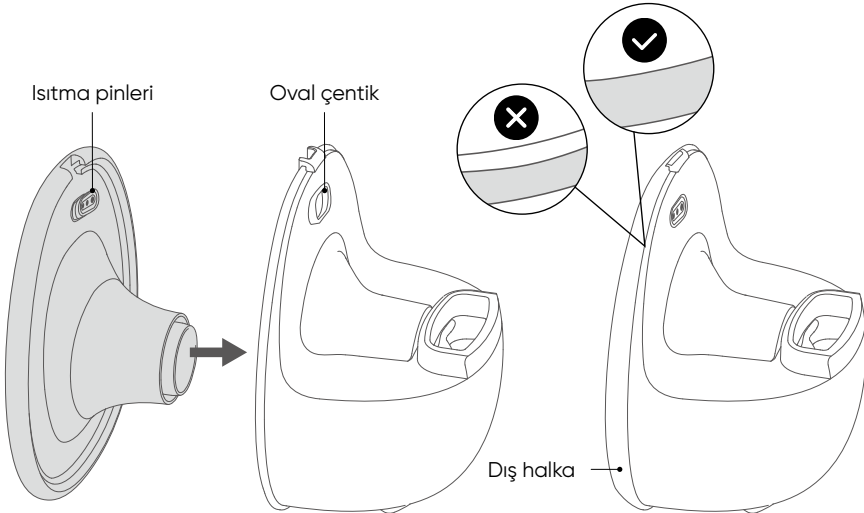

3. Diyagramı kabın oluğuna yerleştirin, diyagramın içbükey tarafı flanş tarafına bakacak şekilde.

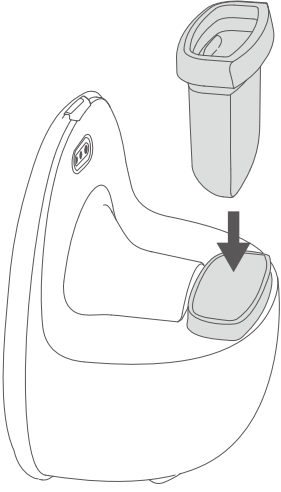

4. Pompa göbeğini kabın üstüne yerleştirin, pompa göbeği ile diyafram arasındaki boşluğu kapatmak için sıkıca bastırın.

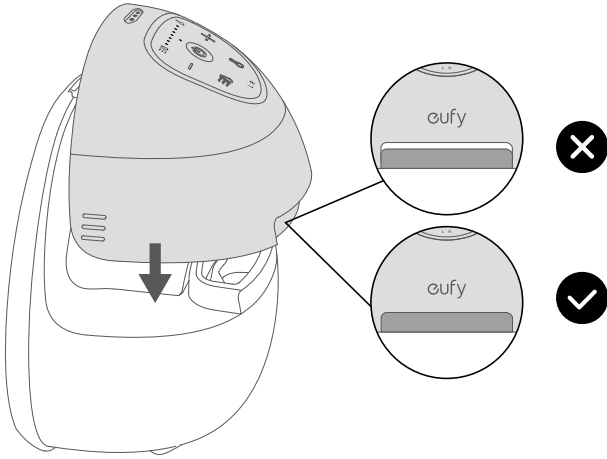

Takma

<https://youtu.be/nzC4MHDWaPM>

Ölçüm

Flanş veya aparat boyutunuzu belirlemek için meme ucu ölçüm kartını kullanın:

1. Meme ucunuz diklene kadar uyarın.
2. Deliği her meme ucuna kaydırın. Tabana sıkıca oturan meme ucu çapında bir delik seçin.
3. Boyut tablosuna göre ölçümünüzü alın.




- Meme ucu esnekliği boyutlandırmayı etkileyebilir. Esnek meme uçlarınız varsa küçültmeniz, daha az esnek meme uçlarınız varsa büyütmeniz gerekebilir. Rahatsızlık yaşıyorsanız veya çıktıda tutarlı bir azalma fark ederseniz, farklı boyutları denemeniz gerekebilir.
- 15 mm, 17 mm, 19 mm ve 21 mm boyutlandırma aparatları 24 mm flanşlarla kullanılmalıdır. 24 mm ve 27 mm flanşlar seçiminize sunulmaktadır.

Meme Ucu Çapı	Önerilen Flanş veya Aparat Boyutu
11-13mm	15mm *
13-15mm	17mm *
15-17mm	19mm *
17-20mm	21mm *

20-23mm	24mm
23-26mm	27mm
* Boyutlandırma aparatları 24mm flanş ile kullanılmalıdır.	


Boyutlandırma Aparatı Kullanın (İsteğe Bağlı)

Doğru bir uyum sağlamak için Meme Ucu Ölçüm Kartını kullanarak uygun bir boyutlandırma aparatı seçin ve boyutlandırma aparatını flanş tünelinin içine yerleştirin.

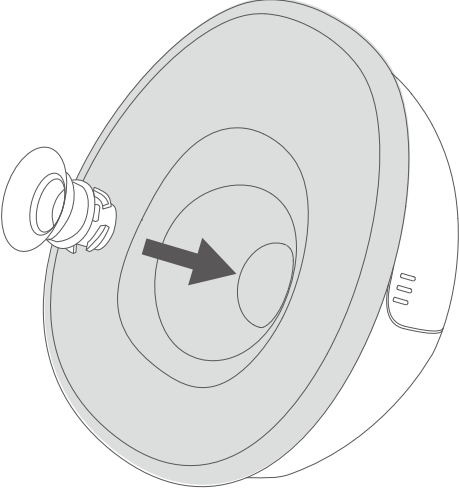


Takma

1. Meme ucunuzun flanş tüneline ortalandığından emin olmak için hafifçe öne eğilin. Göğüs pompası göğsünüze sıkıca dayanmalıdır.

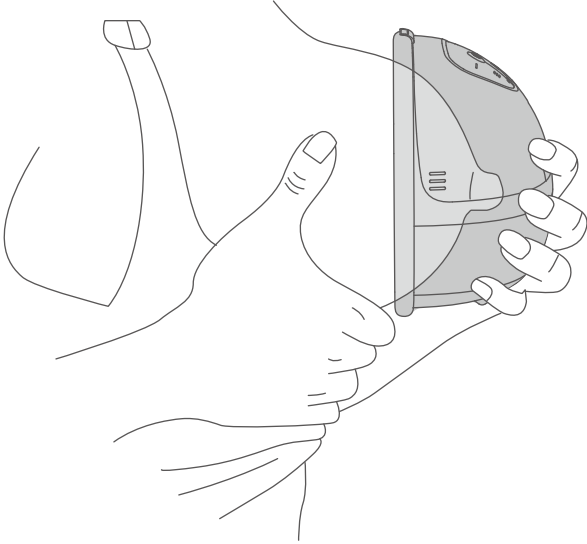

2. Göğüsleriniz ile flanş arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturmak için kapaklı tam kapsamlı bir emzirme sütyeni kullanın.

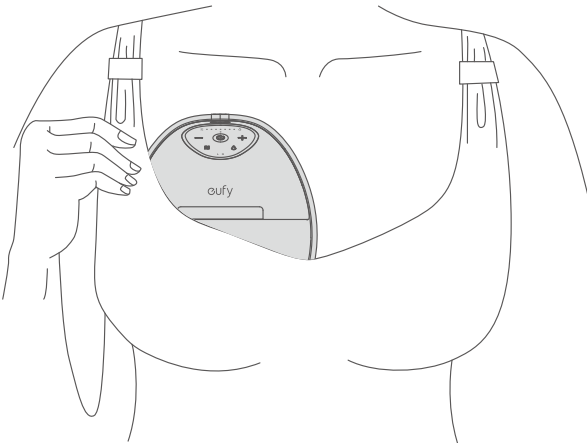



Göğüs pompasının doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını belirlemenize yardımcı olacak iki kriter:

- Sütü çekebilecek fark edilir bir emiş hissedip hissetmediğiniz;
- Takmanın konforlu olup olmadığı.

Takma pozisyonu bu kriterlerden hiçbirini karşılamıyorsa, pompanın konumunu ayarlamanız gerekir.

Vücudunuzun yeni bir pompaya uyum sağlaması biraz zaman alır, bu yüzden en başta sonuçlar iyi değilse cesa-
retinizi kırmayın.

Uygulama Olmadan Kullanım

Sağım

1. Göğüs pompasını açmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.
2. Sağıma başlamak için güç düğmesine basın. Duraklatmak için tekrar basın.

	2 Saniye Basılı Tutun	Göğüs Pompasını Aç / Kapat (Göğüs pompası 30 dakika sağdıktan veya 10 dakika durakladıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.)
	Basın	Duraklat / Devam Et


- Uyarı modu 2 dakika sürecektir, ardından otomatik olarak sağım moduna geçecektir.
- Anne sütü erken gelirse, sağım moduna geçin.
- Isıtmayı açıp kapatmak için ısıtma düğmesine basın.

	Basın	Uyarı Modu ve Sağım Modu Arasında Geçiş Yap
	Basın	Isıtmayı Aç / Kapat

- Emiş veya ısı seviyesini en konforlu seviyeye ayarlayın.

	Basın	Artır / Emişi Azalt / Isı Seviyesi (Isı seviyesini ayarlamak için önce ısıtma düğmesine basın.)
--	-------	--

- Aşırı doldurmayı önlemek için sağım sırasında zaman zaman süt seviyesini kontrol edin. 6 oz'dan (150 ml) fazlaysa sağmayı durdurun.

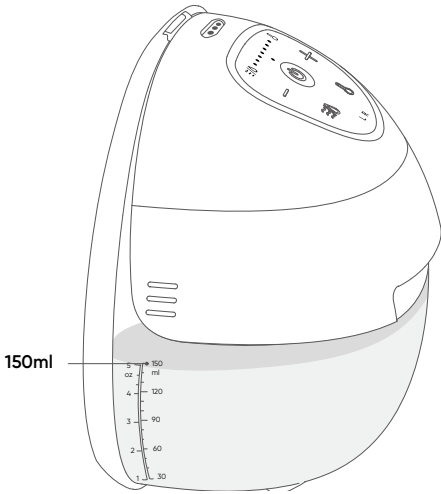

- Hiç süt sağamazsanız, bir seferde 5 dakikadan fazla sağmaya devam etmeyin. Gün içinde başka bir zamanda tekrar deneyin.
- Süreç çok rahatsız edici veya acı verici hale gelirse, pompayı kullanmayı bırakın ve sağlık uzmanınıza danışın.
- Ürünü 35 dakikadan fazla süreyle takmayın ve kullanmayın. Süt sağma seansında ne kadar süreyle süt sağmanız gerektiğini anlamak için sağlık uzmanınıza danışın.

Uyarı Modu ve Sağıım Modu

- **Uyarı modu** (Masaj modu olarak da bilinir):

Süt salma refleksini, yani diğer adıyla süt indirme refleksini uyarmak için bebeğin yaptığı ilk hızlı emmeyi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu mod genellikle göğüslerin süt salmaya başlamasını teşvik etmek için daha hızlı ve hafif bir emiş deseni kullanır. Amaç vücudun süt akışını başlatması için sinyal vermektir. Bu mod genellikle daha kısa sürelidir, birkaç dakika sürer ve sağıım sürecinin ilk aşamasıdır.

- **Sağıım modu:**

Süt salma refleksi tetiklendikten sonra sağıım moduna geçin. Bu mod, bebek gerçekten beslenirken ve göğüsten süt çekerken yaptığı daha yavaş, daha derin emmeyi taklit eder. Sağıım modu sütü verimli bir şekilde çıkarmak için daha yavaş ama daha güçlü emiş kullanır. Bu aşama, annenin göğüslerini yeterince boşaltmak için sağıması gereken süre kadar sürebilir, bu da seans başına yaklaşık 10-20 dakika olabilir.

eufy Baby Uygulaması ile Kullanım

<https://youtu.be/0eWX-TetCos>

Telefonunuz sağıım ortağınızdır. eupy Baby uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.



Cihazları yönetin : Göğüs pompalarını yeniden adlandırın, tarafları seçin ve LED ışığı ayarlayın.

Uzaktan kontrol : Sağıımı başlatın veya durdurun, emiş veya ısı seviyesini ayarlayın, uyarı ve sağıım modları arasında geçiş yapın.

Program ve seans ayarlayın : Sağıımı unutmamanız için kendinize hatırlatın. Her seans için bir süre veya kapasite belirleyin.

OptiRhythm Teknolojisi ile Süt Çıktısını Optimize Edin : 4 önceden ayarlanmış ritim arasından seçim yapın ve emiş yoğunluğunu, hızını ve süresini bebeğinize en uygun şekilde ayarlayarak pompanızı özelleştirin.

1. **Maks Ritim (varsayılan olarak)** : Maksimum çıktı isteyen anneler için. Uyarı ve sağıım modları arasında birden fazla kez geçiş yapın.

2. **Doğal Ritim** : Bebeğin doğal emiş ritmini takdir eden anneler için. Uzun ve kısa çekmelerin karışımıyla uyarı ve sağıım modları arasında geçiş yapın.

3. **Standart Ritim** : Geleneksel elektrikli sağıım emiş desenini tercih eden anneler için. 2 dakika sonra uyarı modundan sağıım moduna tek geçiş.

4. **Nazik Ritim** : Hassas meme uçları olan anneler için. Her emiş, daha yavaş bir tempoda ve daha yumuşak bir dokunuşla çalışacak şekilde özenle kalibre edilmiştir.

Eğitim ve SSS : Daha ayrıntılı talimatlar veya sorun giderme için bakın.


Verileri takip edin : Sağıım geçmişinizi gözden geçirin.

Yazılımı yükseltin : Geliştirilmiş performans veya yeni özellikler için mevcut olduğunda yazılımı yükseltin.

Süt Aktarma


https://youtu.be/v_HzT9psxSY

1. Göğüs pompasını duraklatın veya kapatın. Sızıntıyı önlemek için pompayı çıkarırken öne eğilin.

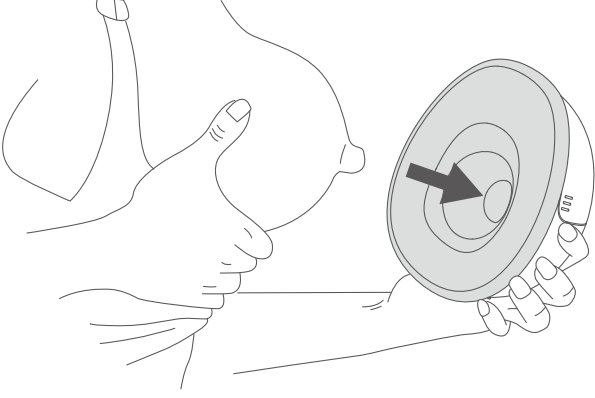


2. Pompa göbeğini kabdan çıkarın. (**Bakın "Sökme" adım 1.**)


 Sızıntıyı önlemek için sütü aktarmadan önce pompa göbeği dışındaki parçaları (diyafram dahil) sökmeyin.

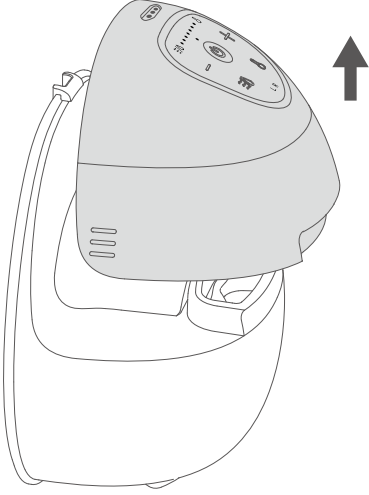

3. Aktarmaya hazır olarak kabı masada bırakın.

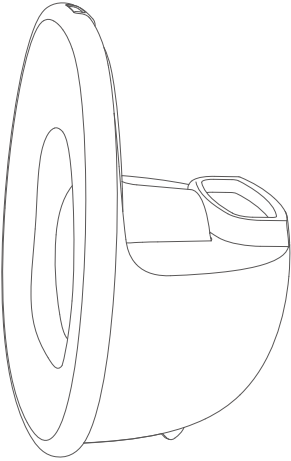

4. Süt dökmek için flanşı yukarıda tutarak kabı eğin. Dökme ağzı aşağı baktığında, tamamen boşaltmak için daha fazla eğin. Son olarak, altındaki sıkışmış sütü toplamak için gerekirse diyaframı çıkarın.

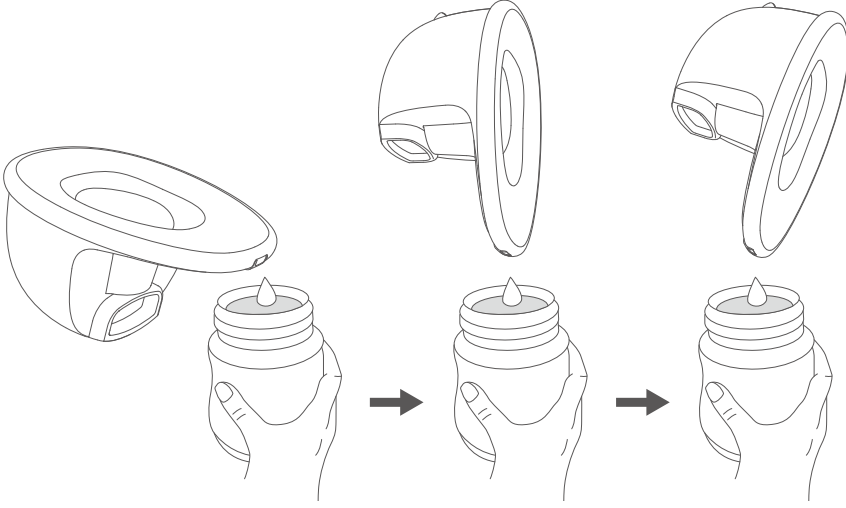

Süt Saklama

Anne Sütünü Saklama

Anne sütünü temiz ve sterilize edilmiş bir süt saklama torbasına veya sızdırmazlık yastıklı bir biberona koyun ve hemen soğutmak veya dondurmak için buzdolabına yerleştirin.



- Anne sütünü tekrar tekrar dondurmayın.
- Taze anne sütünü donmuş anne sütü ile karıştırmayın.

Saklanan Sütü Besleme

Donmuş anne sütünü çözdürmek için bir gece buzdolabına koyun. Alternatif olarak, acil bir durumda çözdürmek için bir kase sıcak su kullanabilirsiniz. Çözöldükten sonra 24 saat içinde tüketilmelidir.



- Bebeğinizi beslemeden önce anne sütünün sıcaklığını kontrol ettiğinizden emin olun.
- Yırtılmasını veya çatlamasını önlemek için süt saklama şişesini kaynar suya daldırmayın.
- Anne sütünü ısıtmak için mikrodalga fırın kullanmayın.
- Beslemeden sonra kalan anne sütünü atın.

Bakım

1. Pompa Göbeği

Her türlü değişiklik yasaktır. Pompa göbeğini açmak veya kurcalamak garantiyi geçersiz kılar. Onarım gerekirse, pompa göbeğini satıcıya veya doğrudan üreticiye iade edin.

2. Yıkabilir Parçalar

Yıkabilir parçaların beklenen kullanım ömrü 1-3 aydır. Uzun süreli depolamadan sonra veya bir sonraki çocuğunuz için süt pompalamadan önce yıkabilir parçaların değiştirilmesi önerilir.

Daha fazla taşınabilir göğüs pompası ve yedek parça satın alınabilir

<https://www.eufy.com/breast-pump>

3. Dahili Batarya

Göğüs pompanız uzun süre kullanılmazsa, dahili batarya yavaşça boşalacaktır. Uzun süre düşük voltajdan kaynaklanan batarya hasarını önlemek için göğüs pompalarınızı her 3 ayda bir şarj edin.

Sıkça sorulan sorular ve çözümleri aşağıdaki bağlantıya tıklayarak SSS bölümünde bulunabilir:

<https://www.eufy.com/products/t8d04121?ref=breast-pump&variant=43660277121210>

Özellikler

Giriş	100-240V ~, 50/60Hz
Çıkış	5V=2A
Batarya Kapasitesi	1400mAh / 3.7VDC
Nominal Güç	5W
Batarya Şarj Süresi	1,5 Saat
Batarya Kullanım Süresi	2 Saat
Ses Seviyesi	<46dB
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C
Taşıma ve Saklama Sıcaklığı	-20°C - 70°C
Taşıma ve Saklama Nemi	15% - 90%

Varsayılan Açık Port: Varsayılan Açık Port: BLE (Bluetooth Düşük Enerji)

Port Açıklaması:

Cihaz açıldıktan sonra, BLE yayını otomatik olarak etkinleştirilir ve Bluetooth ağ yapılandırma (veya kontrol) hizmetleri sağlar. Cihaz kapatıldıktan sonra Bluetooth hizmeti devre dışı bırakılacaktır.Üretici

Üretici

Üretici Shenzhen TPH Technology Co., Ltd.

Adres: Room 203, 2nd floor, 29th Building, Lianchuang Technology Park,
No. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Shenzhen, Çin 518000