


Göğüs Pompası Genel Bakış

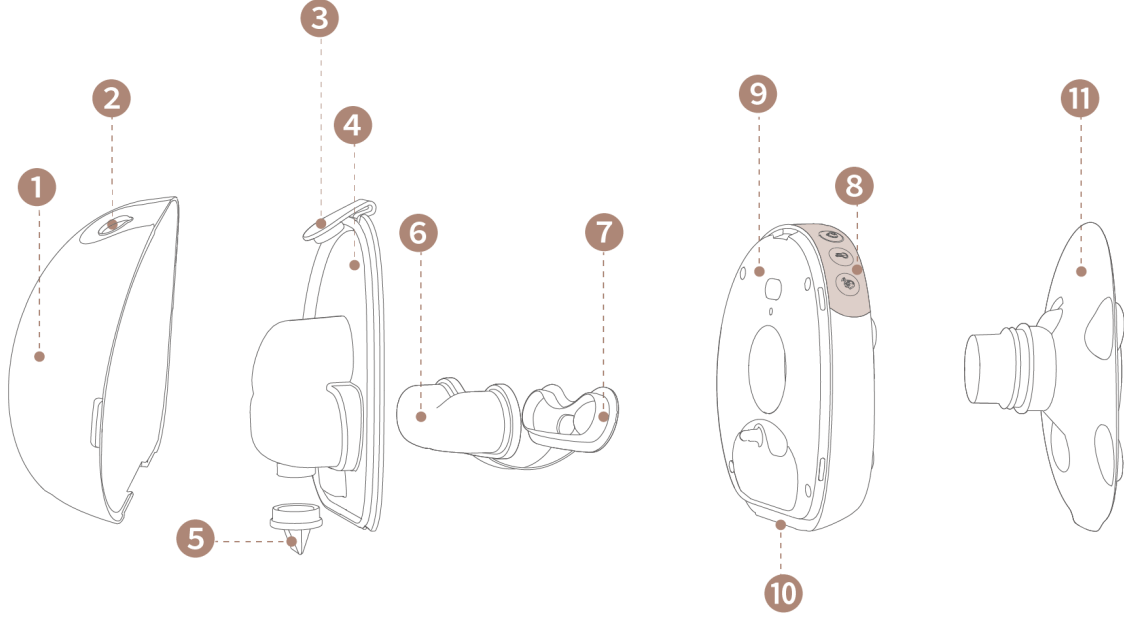

1. Süt Kabı
2. Dökme Ağız
3. Konteyner Kapağı
4. Konteyner Arkası
5. Tek yönlü Valf
6. Diyagram
7. Diyafram Kapağı
8. Kontrol Paneli
9. Pompa Göbeği
10. Şarj Pimleri
11. Flanş (24 mm)


Aksesuarlar ayrıca şunları içerir:



1



2

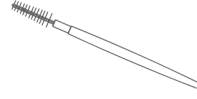

3




4




5



6

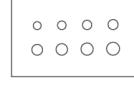

7

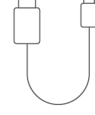


8

1. Şarj Kutusu
2. Ekstra Tek yönlü valfler
3. Tek yönlü valf Temizleme Fırçası
4. Leke Geçirmez Mat
5. Manyetik Şarj Kablosu
6. Boyutlandırma Aparatları (15/17/19/21 mm)
7. Meme Ucu Ölçüm Kartı
8. USB-C Şarj Kablosu


1 Şarj

Pompa merkezini ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin; şarj sırasında çalışmaz.

- **Seçenek 1: 2'si 1 Arada Manyetik Şarj Kablosu**

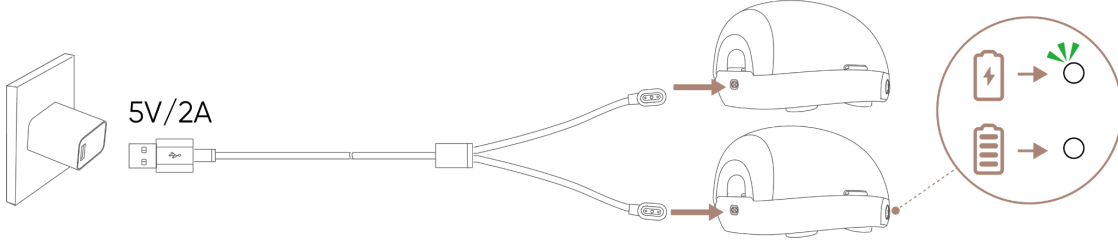

- **Seçenek 2: Şarj Kutusu**

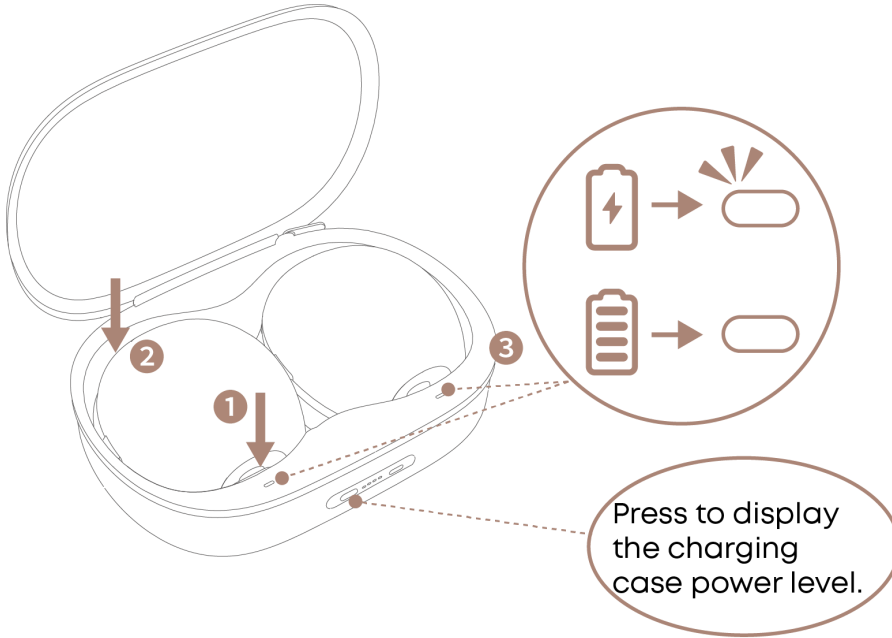


1. Pompa hubının şarj pinlerini kasanın içindeki portla hizalayın ve bir tıklama sesi duyana kadar bekleyin.
2. Pompanın tamamının yuvaya yerleştirilmesine olanak tanımak için pompaları bırakın.
3. Şarj kutusu göstergesinin beyaz yanıp söndüğünden emin olun, bu durum pompaların düzgün bir şekilde şarj olduğunu gösterir. Şarj kutusu, göğüs pompaları tamamen şarj olduğunda otomatik olarak şarj etmeyi durdurur. Şarj kutusunun LED ışığı, prize takılı olduğunda yanmaya devam edecektir.


💡 Şarj kutusu yıkanabilir değildir. Şarj kutusunun içindeki çıkarılabilir silikon leke tutmaz mat yıkanabilir ve sütün kutunun içine dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

2 Sökme


1. Süt kabının yan tutamağını çekerek pompa merkezinden ayırın.

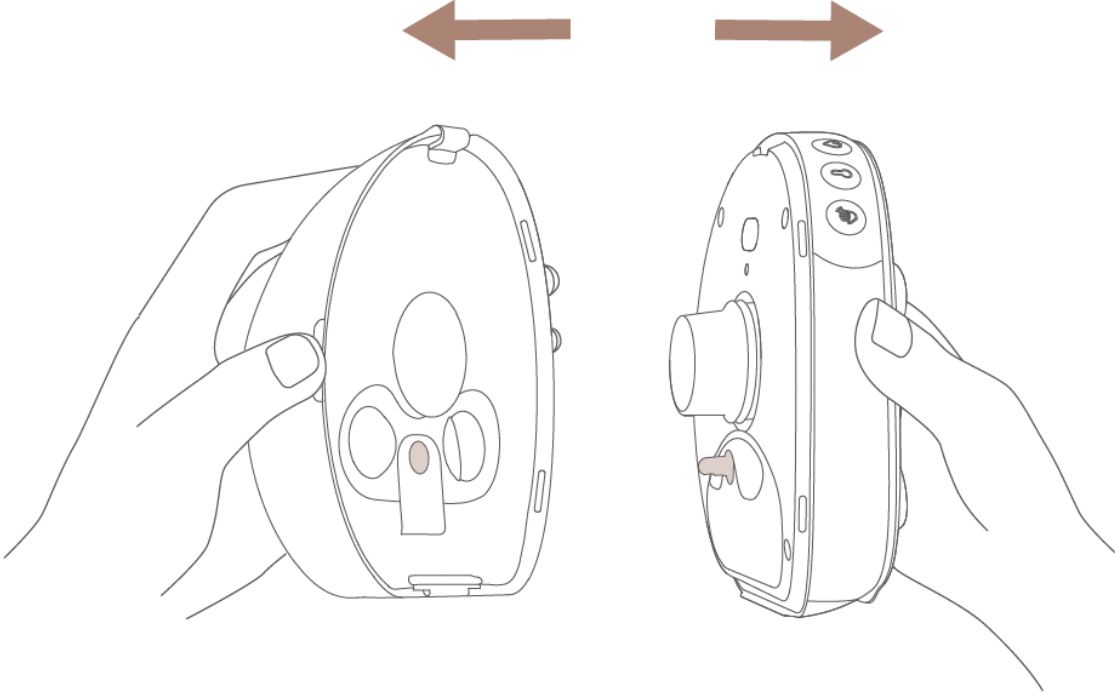


2. Flanşı pompa göbeğinden çıkarmak için basın.

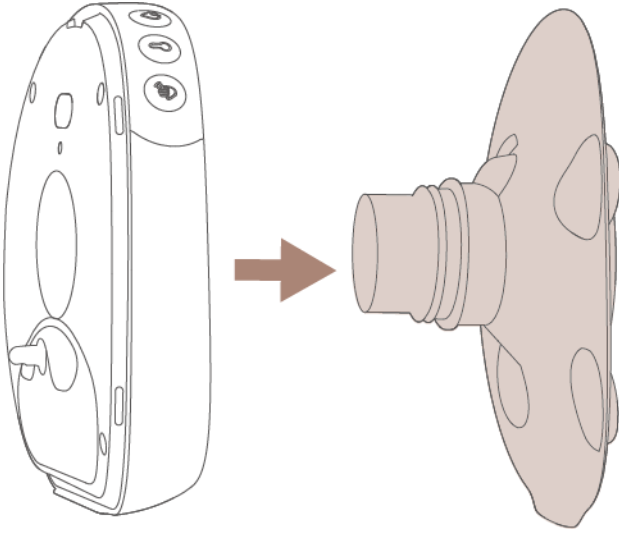


3. Diyaframı çıkarın.

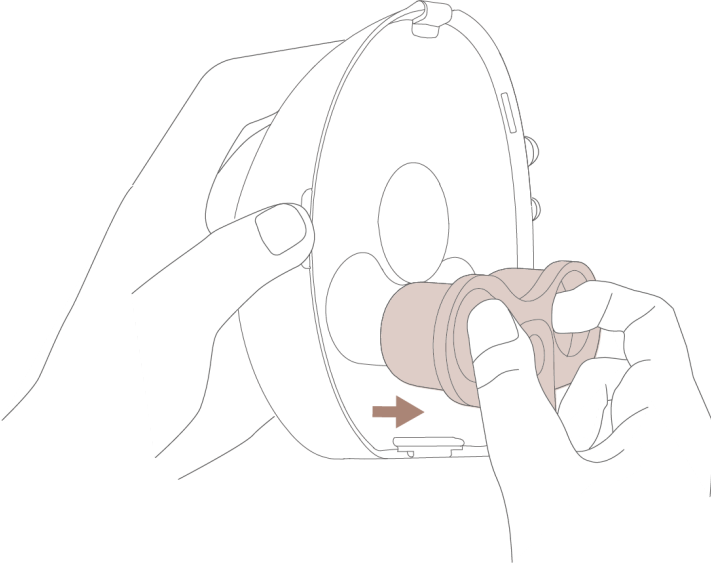


Uzun tırnaklı anneler için — diyaframı çıkarmak için buradan çekip kaldırın.

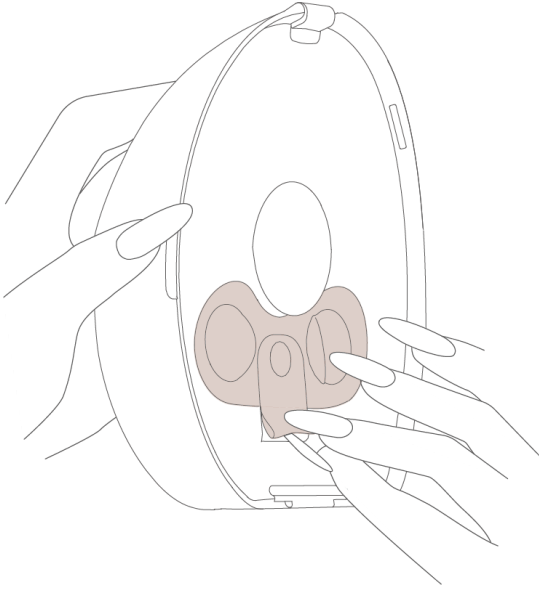

4. Konteyner kapağını açın ve konteynerin arkasını çıkarmak için alttan çekin.

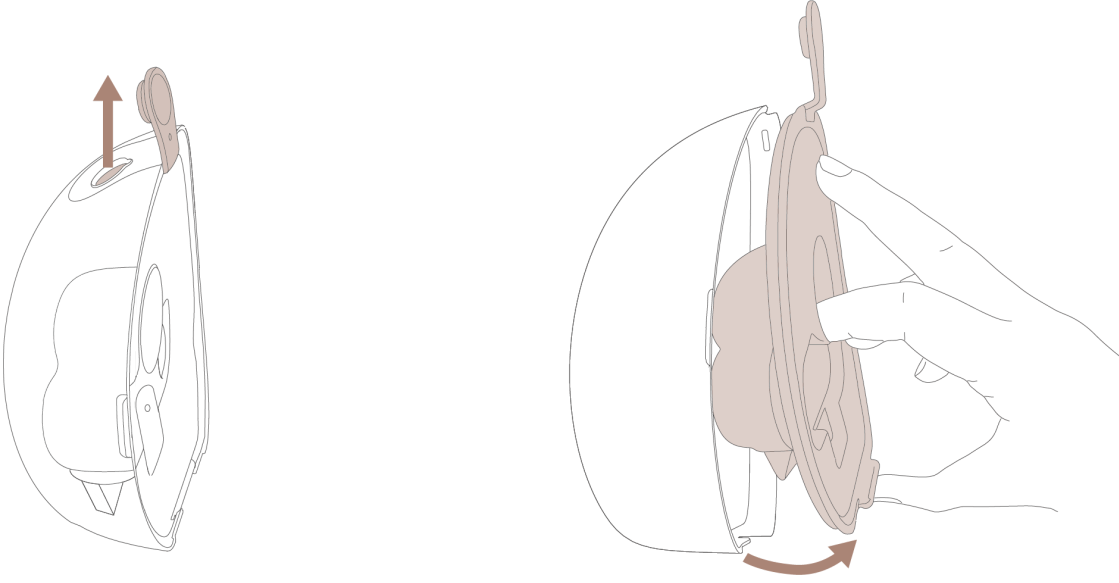

5. Tek yönlü valfi çıkarın

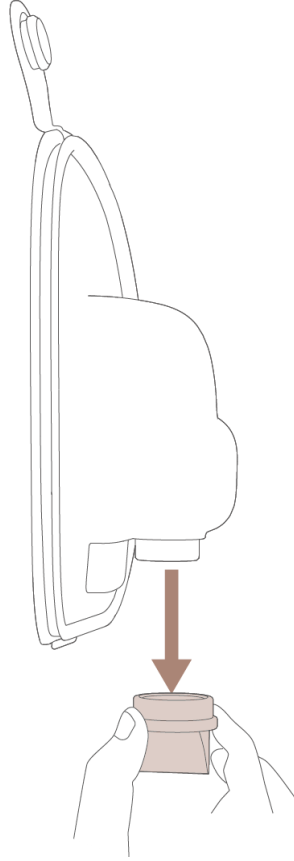

3 Temizlik


Mikrodalga fırını sterilizasyon için kullanmayın.



Pompa göbeği ve şarj kutusu hariç tüm parçalar aşağıdaki şekilde yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir.

! Pompa göbeği YIKANABİLİR DEĞİLDİR. Her pompalama seansından sonra pompa merkezini daima kuru ve temiz tutun. Pompa hubunun üzerine süt dökülürse, doğru şarj işlemini sağlamak için kuru bir bezle silerek temizleyin.

Dishwasher

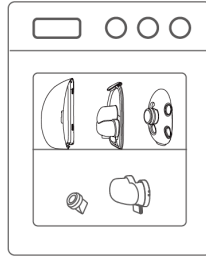


Cooking Pot

Keep stirring to prevent deformation.




Baby Bottle Sterilizer

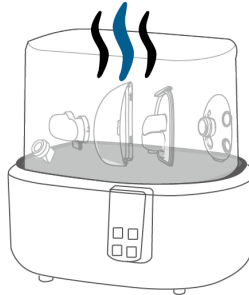

İlk kullanımdan önce: Tüm yıkanabilir parçaları, kabın içine yapışmasını ve erimesini önlemek için sürekli karıştırarak, en fazla 5 dakika kaynatarak sterilize edin. Ayrıca buharla sterilize edebilirsiniz.


Günlük Temizlik: Tüm yıkanabilir parçaları ılık, sabunlu suyla durulayın, ardından hava ile kurutun. Gerekirse, ilk temizlikte kullanılan yöntemlerle temizleyin.

- Hasar önlemek için, valfi temizlemek için yalnızca sağlanan tek yönlü valf temizleme fırçasını kullanın.
- Çizilmeleri önlemek için, yıkanabilir diğer parçaları silikon veya sünger fırça ile temizleyin.

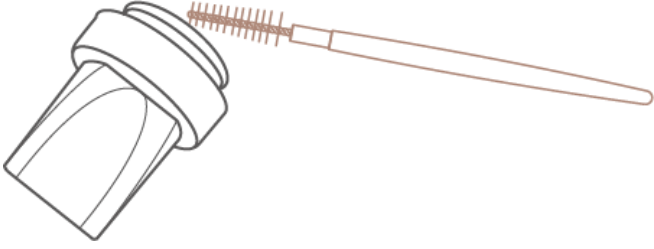


4 Montaj

1. Tek yönlü valfi, kabın arkasındaki küçük deliğe sıkıca itin. Düşmediğinden emin olmak için hafifçe dokunun.

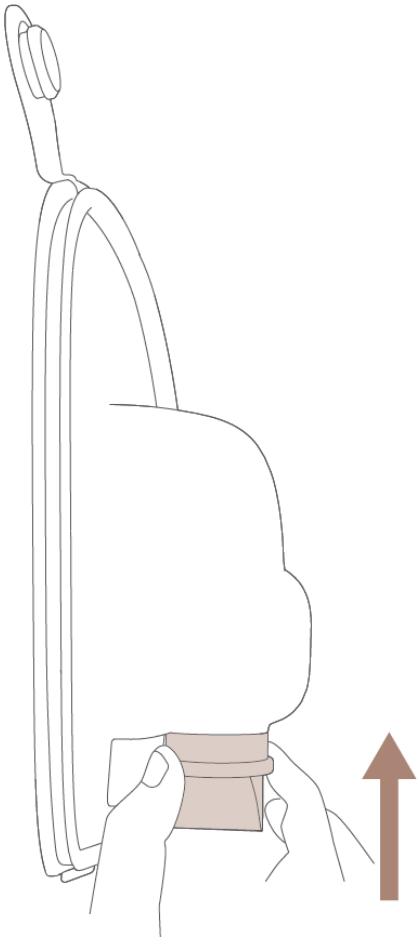


2. Konteyneri tekrar birleştirin.

❶ Kapağı üst yuvayla hizalayın ve alt tırnağı kap yuvasına yerleştirin.

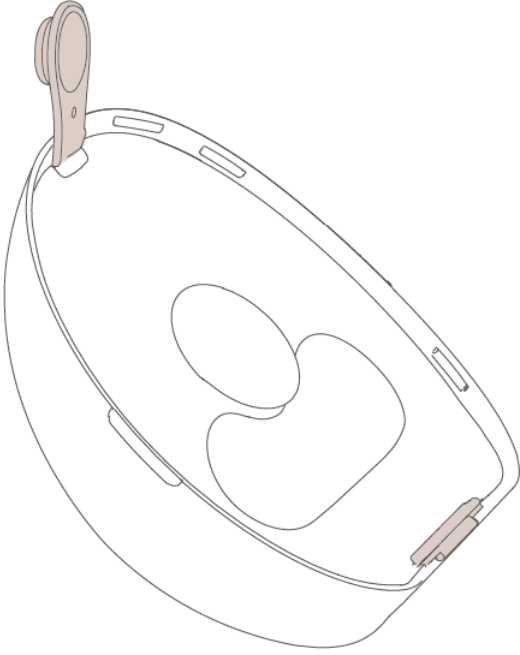


❷ Önce kabın üst kısmını her iki elinizle sıkıca bastırın, ardından bir tık sesi duyana kadar alt kısmını bastırın. Tüm 4 hizalama işaretinin düşük emişi ve sızıntıyı önlemek için kabın arkasının üzerinde konumlandırıldığından emin olun.

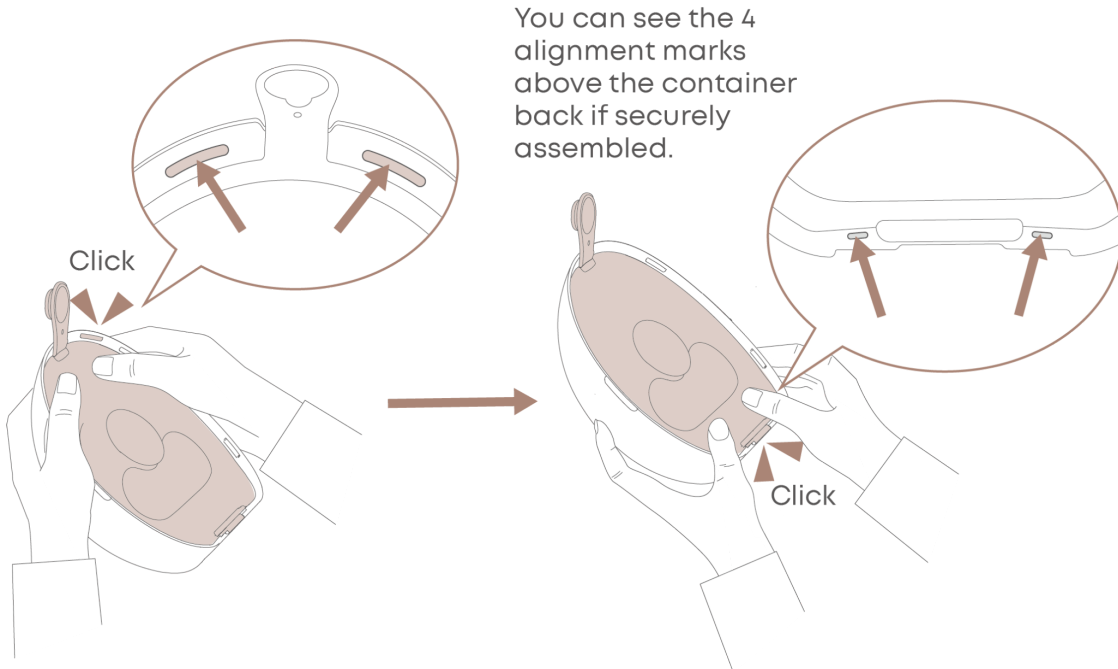


Endişelenmeyin! Endişelenmeyin! Süt kabı dayanıklı PPSU plastikten yapılmıştır. Bastırıldığında kırılmaz.

③ Konteyner kapağını sıkıca ağız kısmına bastırın.

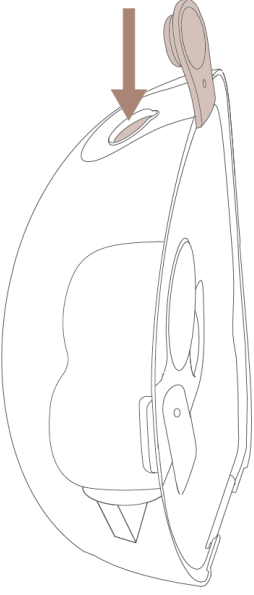

3. Diyaframı, kabın arkasındaki şekillendirilmiş oyuğa yerleştirin. Diyafram kenarının, özellikle üst kavis olmak üzere, oluk kenarı boyunca tamamen yerleştiğinden emin olun.

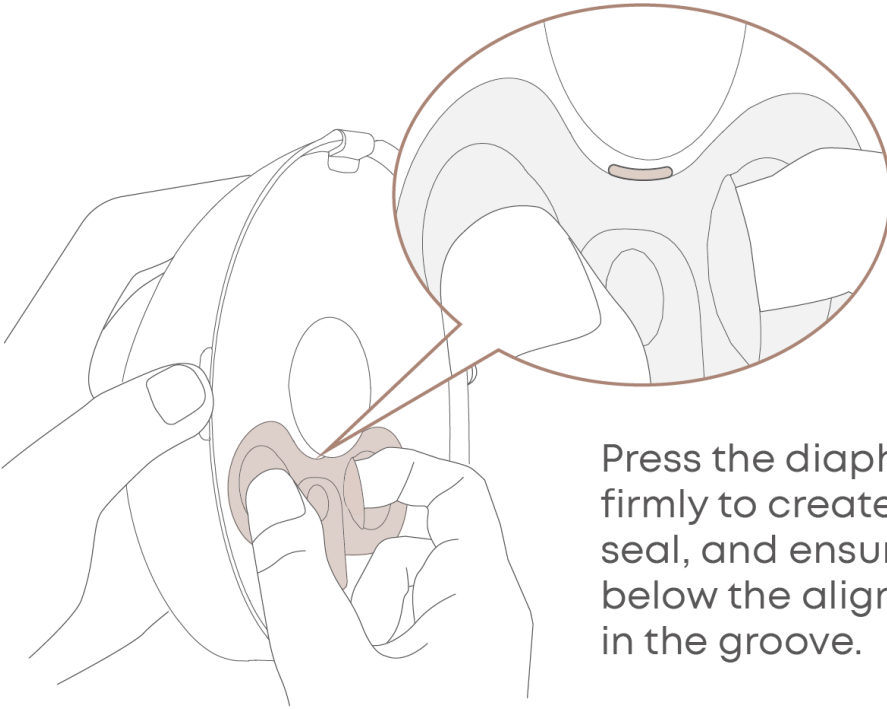


Press the diaphragm lid firmly to create a secure seal, and ensure it sits below the alignment mark in the groove.




Diyaframı monte etmeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun. Nem, pompa göbeğine zarar verebilir.

4. Pompa göbeğindeki pimi diyaframdaki delikle hizalayın ve monte edilmiş kabı göbeğe tıklayana kadar bastırın.

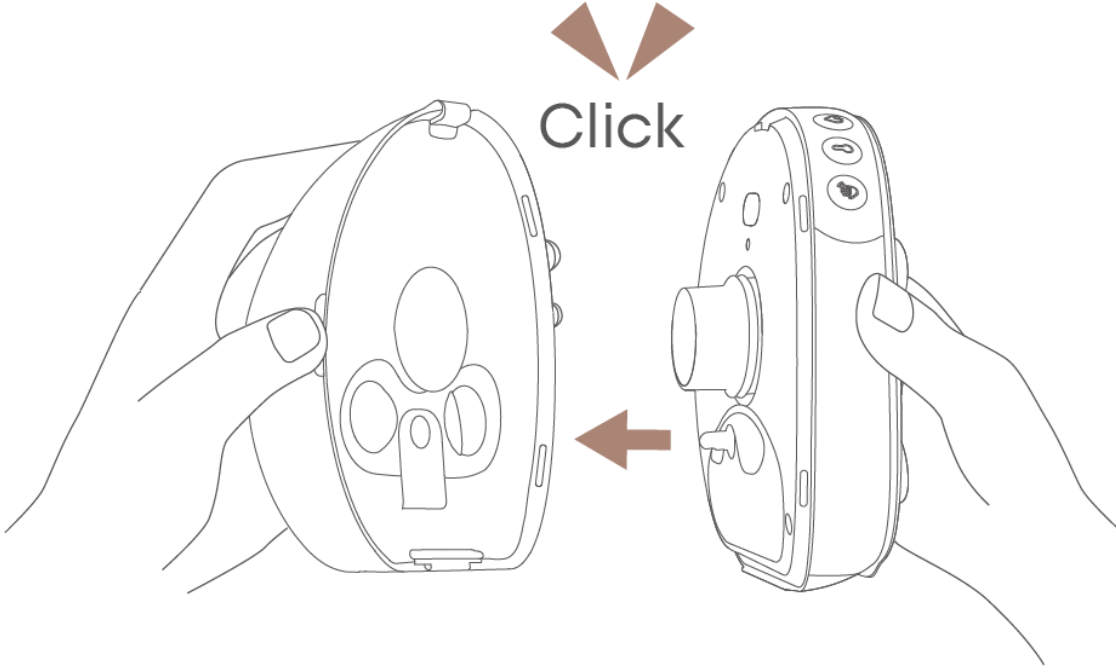


Önemli: Kabı göbeğe yerleştirdikten sonra, güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için hafifçe çekin. Eğer değilse, onları yeniden birleştirmek için yukarıdaki adımları izleyin.

5. Flanşı pompanın üzerine bastırın.

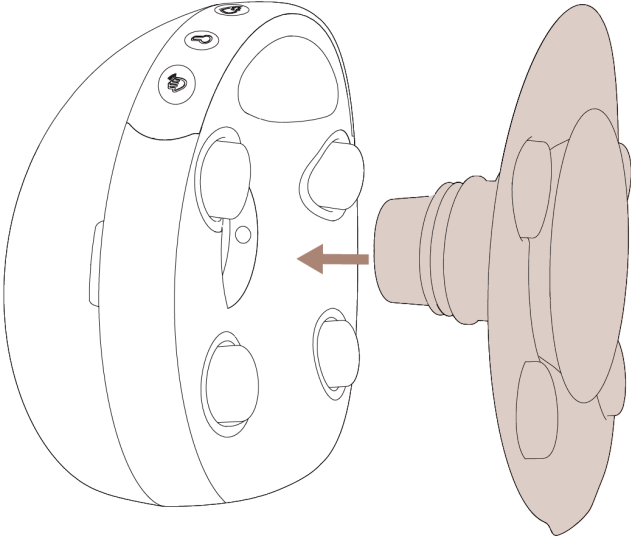


6. Uygun boyutlandırma ekini seçmek için Meme Ölçüm Kartı'nı kullanın ve flanş tüneline yerleştirin.

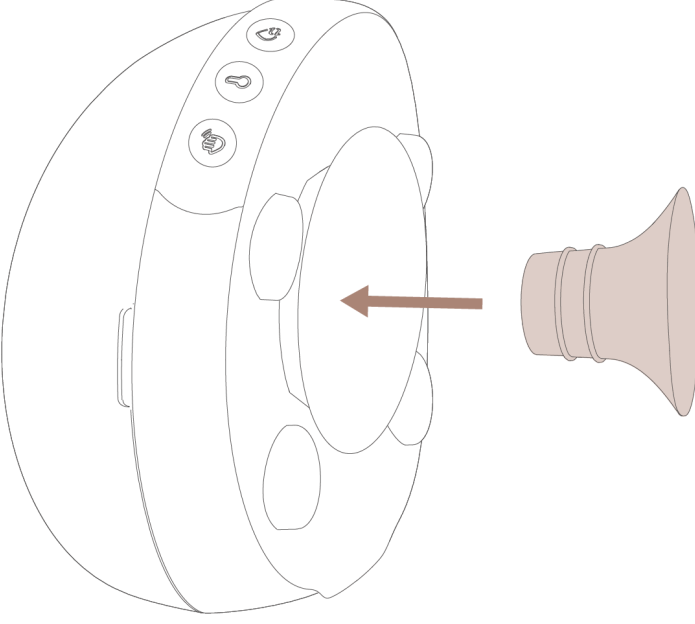


Çok Önemli: Doğru flanş boyutunu seçmek, hem konfor hem de verim açısından kritik öneme sahiptir. İlk kullanımdan önce kutuya dahil edilen Meme Ölçüm Kartı'nı kullanın. Eğer düşük çıktı veya rahatsızlık yaşıyorsanız, farklı bir boyut ek parçası deneyin.

5 Giyme

1. Meme ucunuzun flanş tüneline ortalandığından emin olmak için hafifçe öne eğilin. Göğüs pompası göğsünüze sıkıca dayanmalıdır.

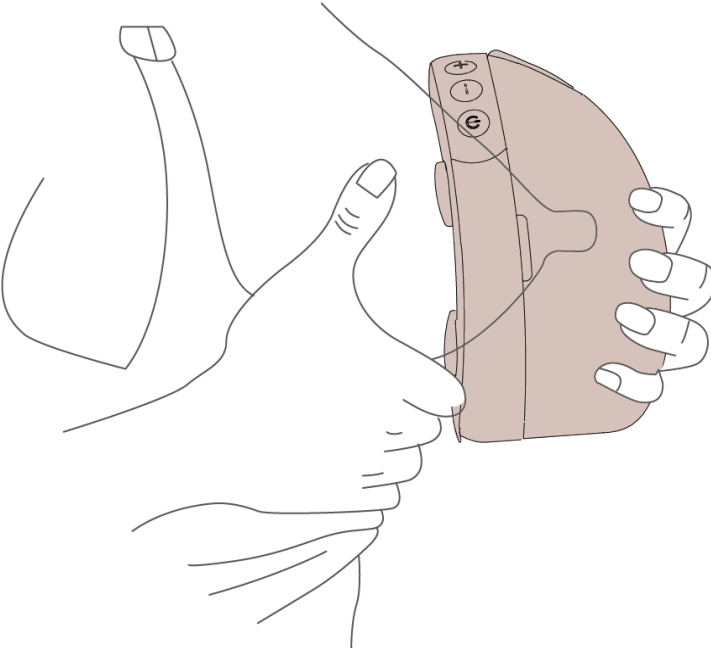

- ② Göğüsleriniz ile flanş arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturmak için kapaklı tam kapsamlı bir emzirme sütyeni kullanın.

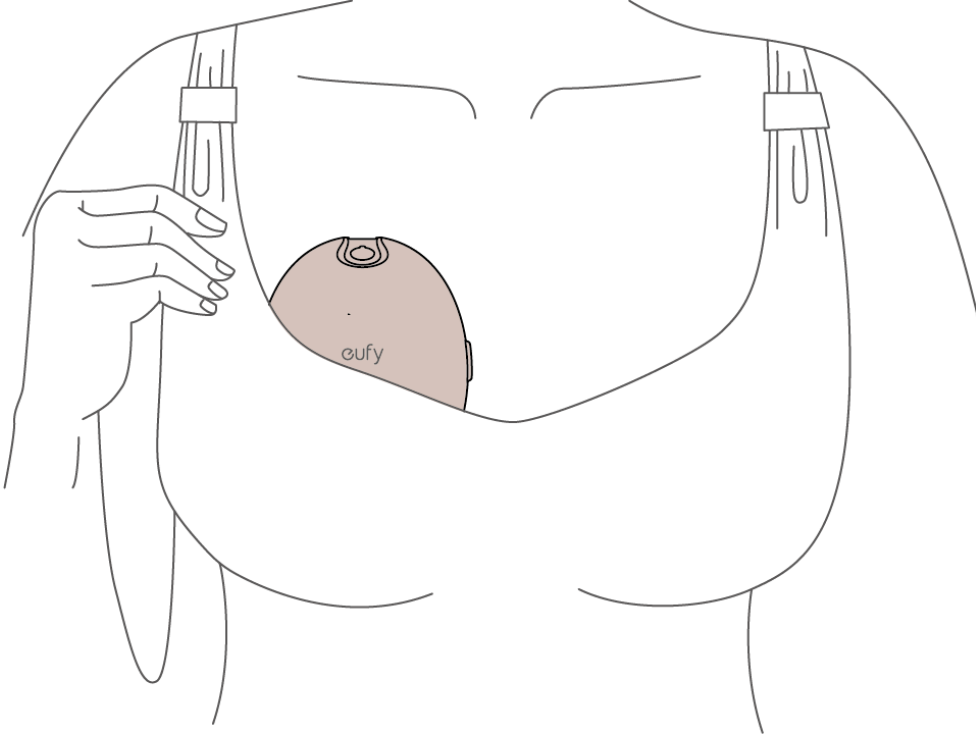

💡 Masaj başlıkları ciltte geçici izler bırakabilir. Bu, hafif uyarılara normal bir tepkidir ve kullanım sonrasında kısa sürede kaybolacaktır.

6 Kullanım



Düğme Kontrolleri

Simge		Eylem	İşlev
	Güç Tuşu	Basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun	Göğüs Pompasını Aç / Kapat Göğüs pompası, 10 dakika hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.
		Basın	Duraklat / Devam Et
	Mod Düğmesi	Basın	Mevcut modu seçmek için basın. Tekrar basarak bir sonraki moda geçin: Uyarma, Süt Sağma, Dinlenme ve Karışık. Uyarı modunda 7 seviye ve sağım modunda 10 seviye bulunmaktadır.
		Hızlıca iki kez basın	Meme Tüneli Işığını Aç / Kapat
	Masaj Düğmesi	Basın	Masaj modunu Aç / Kapat. Masaj modunda 3 seviye bulunmaktadır.

	Isıtma Düğmesi	Basın	Isıtmayı Aç / Kapat - Varsayılan ısıtma süresi 15 dakikadır. - Isıtma süresini uygulama üzerinden değiştirebilirsiniz.
	Seviye Yukarı / Aşağı Düğmeleri	Basın	Emiş/Isıtma/Masaj Seviyesini Artır/Azalt.


Işık ve Ekran Kılavuzu

Işık		Açıklama	Durum
	Pil	Yanıp Sönen Sarı	Şarj Ediliyor
		Sabit Sarı	Tam Şarj Olmuş
		Sabit Turuncu	Pil Seviyesi < %30
		Yanıp Sönen Turuncu	Pil Seviyesi <5%
	Uyarım Modu	Sabit Sarı	Uyarım / İfade / Masaj / Isıtma Modunda
	İfade Modu		


	Masaj Modu		
	Isıtma Modu	Sabit Sarı	Karşılık gelen fonksiyon, uyarım / ifade / masaj / ısıtma seviyelerini ayarlamak için seçilir.
	Seviye	Sabit Sarı	Seçilen modun (sarı yanıp sönen modun) mevcut seviyesini gösterir.
	Çalışma Süresi	Sabit Sarı	Pompalama süresi
	Eşleştirme Modu	Sol / Sağ Göstergeler Dönüşümlü Olarak Yanıp Sönüyor	Uygulamada Sol / Sağ Taraf Eşleştirmesi
		Sol / Sağ Sinyal Sarı	Uygulamada Eşleştirilmiş Sol / Sağ Taraf

7 Sütün Aktarılması

1. Göğüs pompasını duraklatın veya kapatın. Sızıntıyı önlemek için pompayı çıkarırken öne eğilin.

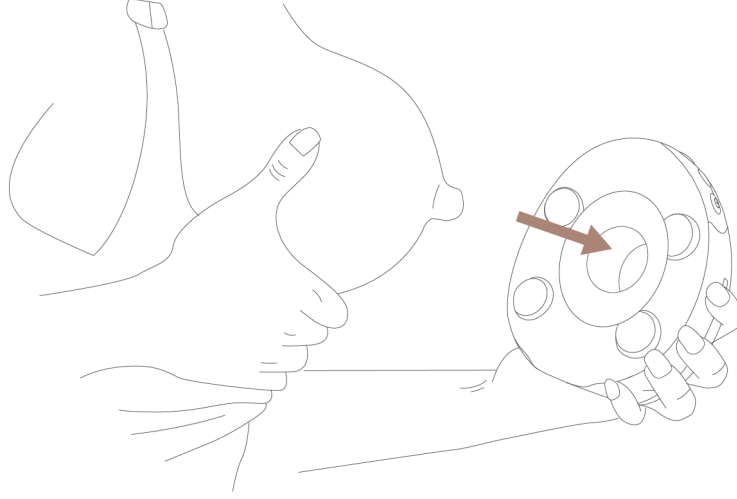


2. Konteyneri pompa göbeğinden çıkarın.

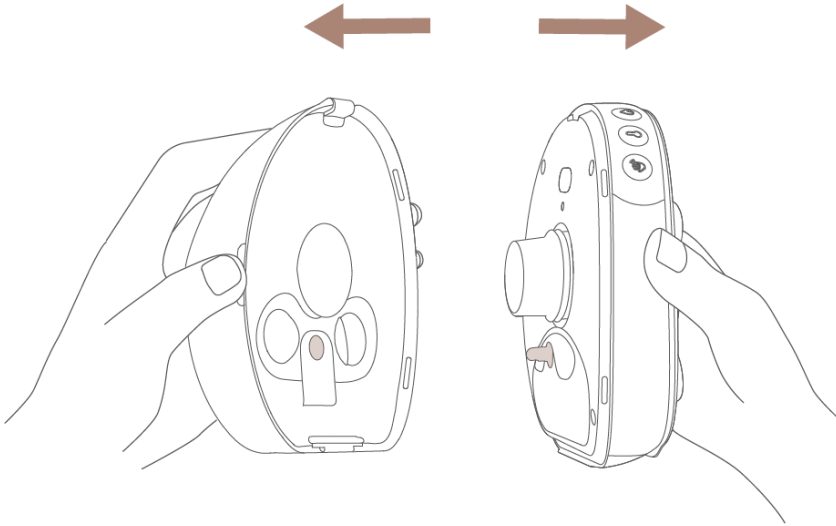


Sızıntıyı önlemek için sütü dökmeden önce kaptan herhangi bir parçayı çıkarmayın.

3. Konteyner kapağını açın.

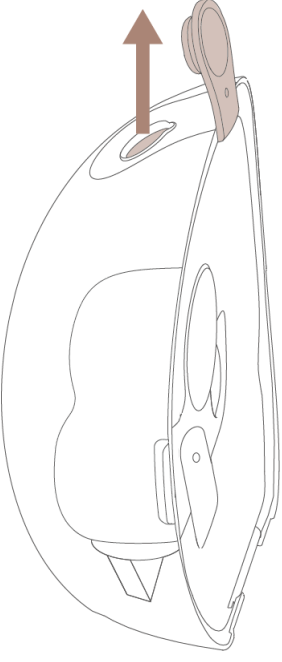


4. Sütü dökün.

❶ Flanş tüneli yukarı ve dökme ağzı aşağı bakacak şekilde kabı eğin. Altındaki sıkışmış sütü toplamak için gerekirse diyaframı çıkarın.

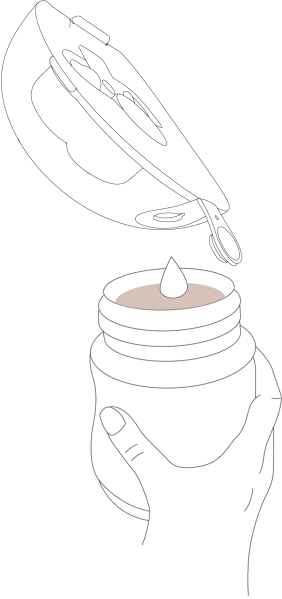

- ② Dökme işleminden sonra diyafram haznesinde az miktarda süt kalabilir. Tüm sütü toplamak için diyaframı çıkarın ve kabı dik bir şekilde masanın üzerine koyup içinde sıkışmış olan sütün geri akması için 10 saniye bekleyin.

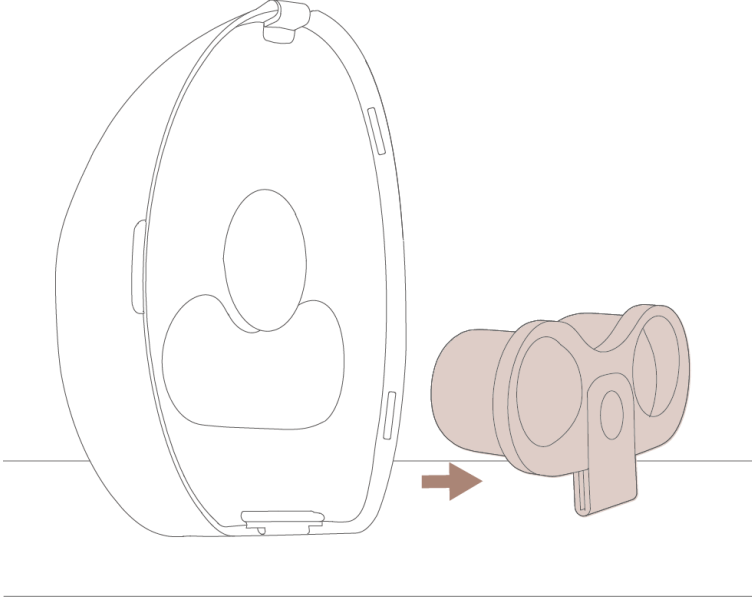

- ③ Toplanan sütü dökün.



8 Uygulama

Pompanızı tamamen kişiselleştirilmiş bir pompalama deneyimi için **eufy uygulamasıyla** kullanın. Pompalama ayarlarını özelleştirin, verilerinizi takip edin ve kaydedin, seanslarınızı kolayca yönetin.

1. En son sürüm **eufy uygulamasını** (**eufy Baby** değil) indirmek için App Store veya Google Play'i ziyaret edin ve bir hesap oluşturun.



💡 Eğer şu anda **eufy Baby uygulamasını** kullanıyorsanız, mevcut tüm cihazları kullanmaya devam etmek ve yeni cihazlara ve özelliklere erişmek için lütfen **eufy uygulamasına** geçiş yapın.

2. Cihaz **Ekle** > **Bebek** > **Göğüs Pompası** > **Giyilebilir Göğüs Pompası S2 Pro** adımlarını izleyin ve cihazı eşleştirmek için uygulama talimatlarını takip edin.
3. Donanım yazılımı güncellemelerini kontrol ederek yazılımın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun:
 - ❶ **Ana** ekranda, Ayarlar ekranına girmek için **Bebek** > **seçeneğine dokunun.**
 - ❷ Bir göğüs pompası seçin ve **Cihaz Hakkında** > **Donanım Yazılımı Güncellemelerini Kontrol Et** seçeneğine dokunun.
 - ❸ Bir göğüs pompasının güncellemesini tamamladıktan sonra, başka bir göğüs pompası seçin ve Adım ❷'yi tekrarlayın.

9 Yıkanabilir Parçaların Değiştirilmesi ve Satın Alınması

Yıkanabilir parçaların tahmini ömrü 1-3 ay arasındadır ve gerçek ömür, kullanım ve sterilizasyon sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Emiş gücünde ve performansta bir azalma fark ederseniz (özellikle tek yönlü valf) ya da bir sonraki çocuğunuz için süt sağmayı planlarken onları çok uzun süre sakladıysanız, değiştirin.


Göğüs pompanız için ekstra yıkanabilir parçalara mı ihtiyacınız var? İhtiyacınız olanı bulmak ve sipariş vermek için eufy.com adresini ziyaret edin.

10 En İyi Sorun Giderme İpucu

1. Konteyner göbeğe sıkıca oturmuyor mu?

Adım 1: Kabı tekrar birleştirin.

Önce kabın üst kısmını her iki elinizle sıkıca geriye doğru bastırın, ardından alt kısmını. Tüm 4 hizalama işaretinin düşük emişi ve sızıntıyı önlemek için kabın arkasının üzerinde konumlandırıldığından emin olun. Toplamda 4 hizalama işareti vardır: dökme ağzının sol ve sağ tarafında 2, alt kısmında da 2.

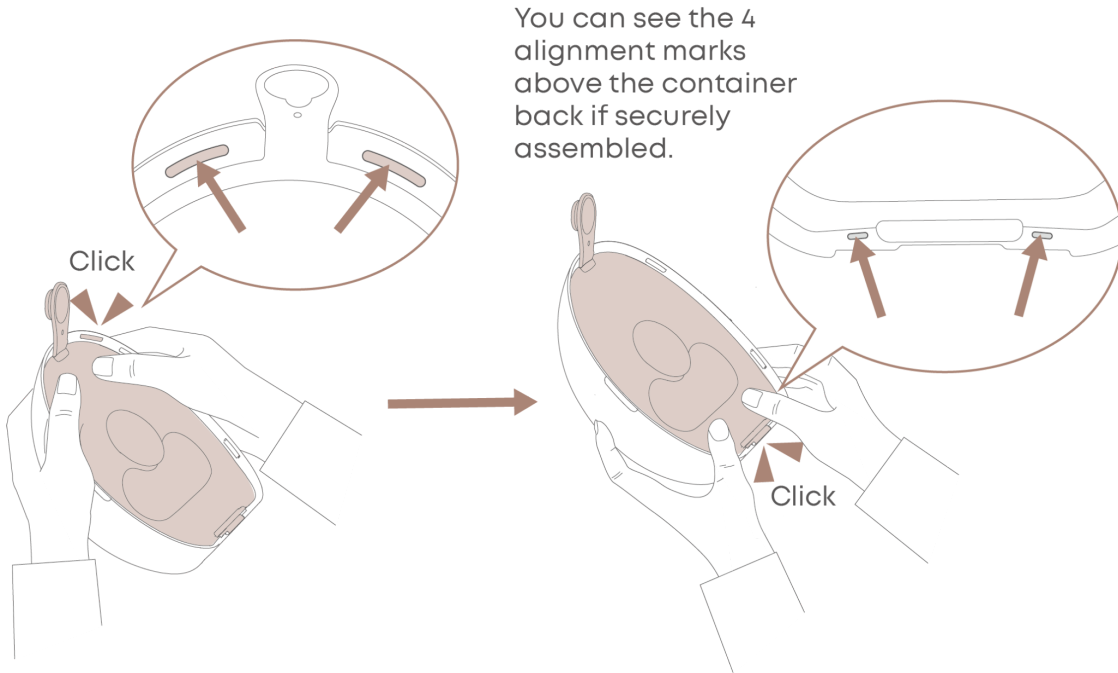

Adım 2: Diyaframı yeniden monte edin.

Diyaframı, kabın arkasındaki şekillendirilmiş oyuğa yerleştirin. Diyafram kenarının, özellikle üst kavis olmak üzere, oluk kenarı boyunca tamamen yerleştiğinden emin olun. Diyafram kapağını güvenli bir şekilde kapatmak için sıkıca bastırın ve oluğun içindeki hizalama işaretinin altında yer aldığını doğrulayın.

Adım 3: Kabı merkeze yeniden takın.

Pompa göbeğindeki pimi diyaframdaki delikle hizalayın, ardından monte edilmiş kabı bir tık sesi duyup hissedene kadar göbeğe sıkıca bastırın.

2. Hiç emiş gücü yok mu, yoksa çok az mı?

- Tek yönlü valf ve diyaframı hasar açısından — çatlaklar, kırıklar, delikler veya yırtıklar için inceleyin. Eğer hasar tespit edilirse, derhal kullanmayı bırakın ve etkilenen parçayı değiştirin.
- 4 ana bileşenin (tek yönlü valf, diyafram, kap ve flanş tüneli) doğru bir şekilde monte edilip edilmediğini ve tamamen sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin. Uygun olmayan montajın olası nedenleri:
 - Tek yönlü valf tam olarak yerine oturtulmamış
 - Konteynerin arkası, 4 hizalama işaretinin tamamının altında tam olarak yerleşmemiş.
 - Diyafram kenarı, oluk kenarı boyunca tam olarak yerine oturmamış.
 - Diyafram kapağı sıkıca bastırılmamış ve yuvadaki hizalama işaretinin altında yer almıyor.
 - Konteyner, göbeğe tam olarak oturtulmamış.
 - Flanş tamamen itilmemiş ve güvenli bir şekilde yerine oturmamış.
 - Uyum ayarlayın: Meme ucunuzun flanş tünelinin ortasında olduğundan ve pompanın göğsünüze sıkıca oturduğundan emin olun.
 - Daha iyi bir uyum için farklı bir ek boyutu deneyin.

 Vücudunuzun yeni bir pompaya yanıt vermesi zaman alabilir — başlangıçta çıktı düşükse cesaretiniz kırılmasın.

3. Döktükten sonra geride kalan süt?

- Diyaframda sıkışan süt: Diyaframı çıkarın ve sıkışan sütün geri akmasını sağlamak için kabı masanın üzerine dik bir şekilde 10 saniye boyunca yerleştirin, ardından dökün.
- Konteynerde kalan süt: Kalan sütün aşağı akmasına yardımcı olmak için konteyneri şişeye doğru birkaç kez hızlıca vurun.

4. Sızıntı nasıl önlenir?

- Konteynerin arka kısmının sıkıca itildiğinden ve dökme ağzının sol ve sağ taraflarında iki, alt kısmında ise iki olmak üzere toplam 4 hizalama işaretinin altına tam oturduğundan emin olun.
- Göğüsler ile flanş arasında sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için tam kapatıcı bir emzirme sütyeni giyin.

- Pompalama sırasında aşırı şekilde geriye yaslanmayın veya öne eğilmeyin.
- Sütü aktarmadan önce kabı sökmeyin.
- Sütü aktarırken flanş tünelini yukarı doğru bakacak şekilde tutun.

5. Ağrı mı hissediyorsunuz?

Doğru meme ucu flanş boyutunu seçtiğinizden emin olun. Sağlanan emzik ölçüm kartını ve boyutlandırma kılavuzunu inceleyin. Gerekirse, en rahat ve etkili uyumu bulmak için bir beden büyüğünü ya da küçüğünü deneyin.

Giyme pozisyonunu ayarlayarak meme ucunun flanş tünelinin ortasında hizalanmasını sağlayın.

Emiş gücünü yavaşça artırın, güçlü ama rahat hissedene kadar.

Isıtma ve masaj özelliklerini kullanarak konforu ve rahatlamayı artırın.

Püskürtme spreyini deneyin.

6. S2 ile buzdolabı hilesi nasıl yapılır?

Konteyneri pompa merkezinden ayırın. Flanş tünelini, kap tüneline yerleştirerek tek bir entegre ünite oluşturun, ardından buzdolabında saklayın.

 Pompa göbeğini buzdolabına koymayın.

7. Göğüs pompası merkezi şarj olmuyor veya açılmıyor mu?

- Pompa merkezindeki güç düğmesine 12 saniye boyunca basılı tutarak sıfırlayın.
- Şarj kutusunu kullanıyorsanız, şarj pinleriyle doğru temas sağlamak için göğüs pompalarını ayarlayın.
- Şarj kutusundaki güç gösterge düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutarak sıfırlayın.
- 5V/2A veya daha yüksek bir güç adaptörü kullanın.
- Dahil edilen manyetik şarj kablosunu kullanarak doğrudan şarj edin.

8. Şarj kutusu şarj edilemiyor veya göğüs pompalarını şarj edemiyor mu?

Şarj kutusundaki güç gösterge düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutarak sıfırlayın.

9. Uygulama cihazı bulamıyor veya ekleyemiyor mu?

Adım 1: Uygulama mağazanızdan eufy uygulamasını en son sürüme güncelleyin.

Adım 2: + ve – tuşlarına aynı anda 2 saniye boyunca basın, L ve R gösterge ışıkları dönüşümlü olarak yanıp söndüğünde cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterir.

Adım 3: Eşleştirmeyi tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.

Sadece bir pompa uygulamaya mı bağlanıyor?

Eufy uygulamasını kapatıp yeniden açın. Bağlantısı kesilmiş pompanın eşleştirme modunda olduğundan emin olun, ardından o birim için eşleştirme işlemini yeniden yapın.

10. Firmware nasıl güncellenir?

Adım 1: Ana ekranda, Ayarlar ekranına girmek için **Bebek** >  >  seçeneğine dokununuz.

Adım 2: Bir göğüs pompası seçin ve Cihaz Hakkında > Donanım Yazılımı Güncellemelerini Kontrol Et'e dokununuz.

Adım 3: Bir göğüs pompasının güncellemesini tamamladıktan sonra, başka bir göğüs pompasını seçin ve **Adım 2**'yi tekrarlayın.