

Пайдаланушы нұсқаулығы

Өнім атауы: eufy киілетін кеуде сорғышы E20

Модель: T6060

Сүтсорғышқа шолу

Зарядтау

Бөлшектеу

Тазалау және зарарсыздандыру

Киіп жүру

Пайдалану


Сүтті тасымалдау

Қосымшаны жүктеу (міндетті емес)


Өндіруші

Тұтынушыларға қызмет көрсету


Сүтсорғышқа шолу

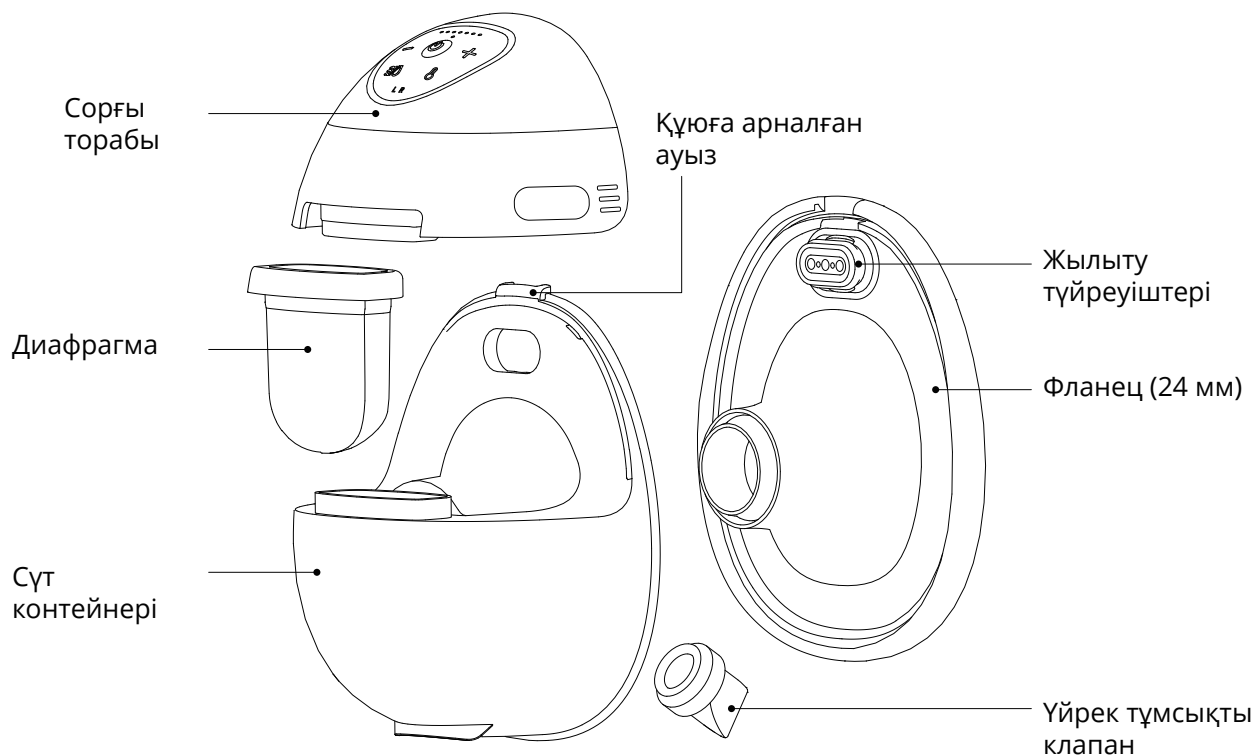

Аксессуарларға мыналар да кіреді:

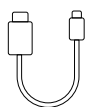

Зарядтау кабельдері x2

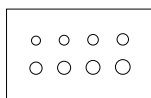

Емізік өлшем картасы


Зарядтау

USB-C зарядтау кабелін (қоса беріледі) және 5V/1A немесе одан жоғары адаптерді (қоса берілмейді) пайдаланып, сүт сорғыларын зарядтаңыз.



Неліктен менің сорғы түйінім жүктелмейді?


Егер сіз жұмыс істемейтін сорғы хабына тап болсаңыз, сорғы хабының қуат түймесін 12 секунд басып тұрып, оны қайта іске қосып, қосылуын тексеріңіз.

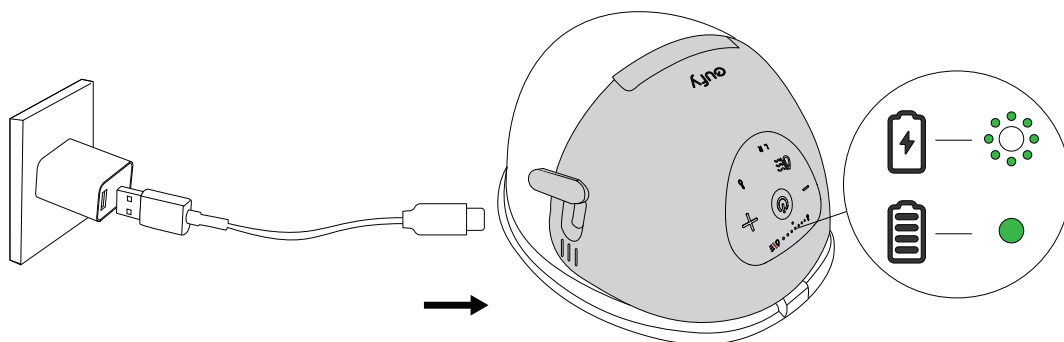


Бөлшектеу

1. 1-қадам: Бір қолыңызбен сорғы түйінін ұстап, екінші қолыңыздың бас бармағымен шүмекке жақын контейнердің шетін сыртқа қарай тартып, сорғы түйінін шүмектен босатыңыз. (Фланецті тартпаңыз.)


2-қадам: Хабты көтеріңіз.

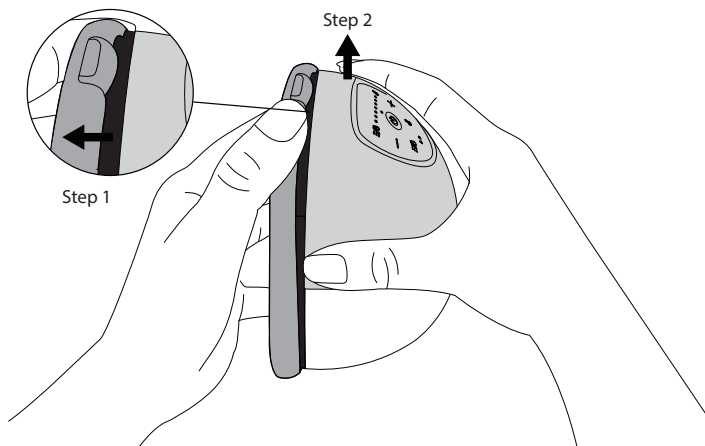


2. Диафрагманы ойықтан алыңыз.

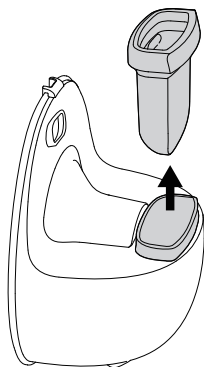

3. Фланецтің сыртқы сақинасын алып тастаңыз, қыздыру түйреуіштерін сопақша ойықтан шығарыңыз, содан кейін бүкіл фланецті шығарыңыз.

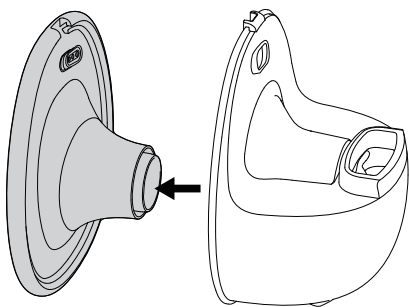

4. Саусақпен үйрек тұмсық клапанын шертіп, оны алып тастаңыз.

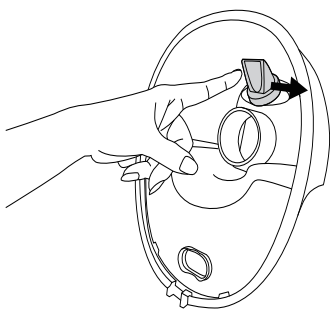

Тазалау және зарарсыздандыру



- **Алғашқы пайдаланудан бұрын:** Барлық жуылатын бөлшектерді контейнерге жабысып, еріп кетпеуі үшін үнемі араластыра отырып, 5 минутқа дейін қайнатып стерильдеңіз. Балама ретінде, бу арқылы ең көп дегенде 5 минутқа дейін стерильдеуге болады. Балама ретінде, бу арқылы стерильдеуді ең көп дегенде 5 минутқа дейін орындаңыз.
- **Күнделікті тазалау:** Жуылатын барлық бөлшектерді жылы, сабынды сумен шайып, содан кейін ауада құрғатыңыз. Қажет болған жағдайда, бастапқы тазалау әдістерін қолданып, стерильдеңіз.
- **Жуылатын бөлшектердің қызмет ету мерзімі:** Жуылатын бөлшектердің болжалды қызмет ету мерзімі 1-3 ай, ал нақты қызмет ету мерзімі пайдалану және стерилизация жиілігіне байланысты өзгереді. Егер сіз сорғыштың және өнімділіктің төмендеуін байқасаңыз (әсіресе үйрек тұмсықты клапанында), немесе келесі балаңыз үшін сүт соруға жоспарлап, оларды ұзақ уақыт сақтап қойған болсаңыз, оларды ауыстырыңыз.

Микротолқынды пешті зарарсыздандыру үшін пайдаланбаңыз.




Барлық жуылатын бөлшектерді (сорғы хабынан басқа) келесі тәсілдермен стерильдеуге болады.



Әрбір сору сеансынан кейін сорғы хабын құрғақ және таза күйде ұстаңыз. Егер сүт сорғы хабына төгілсе, оны құрғақ шүберекпен сүртіп, дұрыс зарядталуын қамтамасыз етіңіз.

Ыдыс жуғыш
машина

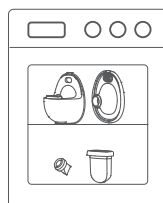

Пісіру кастрюлясы




Балаға арналған бөтелке
стерилизаторы




Құрастыру


1. Контейнердің төменгі бөлігін жоғары көтеріп, бас бармағыңыз бен сұқ саусағыңызбен контейнердің ішіндегі кішкентай тесікке үйрек тұмсық клапанын салыңыз және оның түсіп кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны жеңіл түртіңіз.

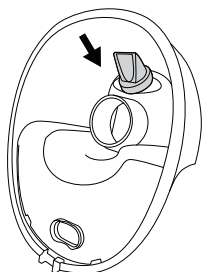


2. Фланецті контейнерге итеріп қойыңыз, қыздыру түйреуіштері сопақша ойыққа мықтап кіргеніне көз жеткізіңіз. Сыртқы сақинаны орап, оның дұрыс жабылғанын қамтамасыз етіңіз, сүттің ағуын болдырмау үшін.

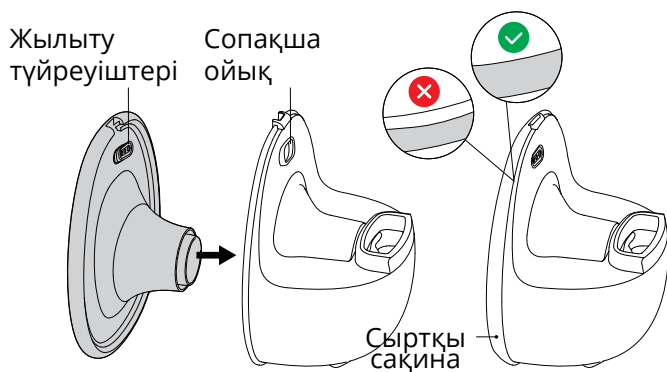


3. Жылытқыш түйреуіштердің артқы жағына толық созылу үшін мықтап басыңыз. Егер толық созылмаса, жылыту істен шығуы мүмкін.

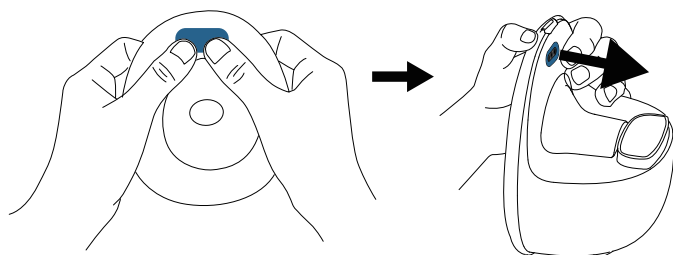

4. Диафрагманы контейнердің ойығына салыңыз, диафрагманың ойыс жағы фланец жағына қараған болсын.

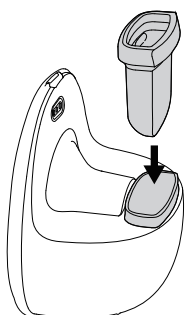


5. Сорғы хабын контейнердің жоғарғы жағына орнатыңыз, сорғы хабы мен диафрагма арасындағы саңылауды тығыздау үшін мықтап басыңыз.

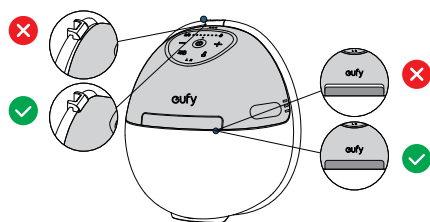

💡 Сорғы хабы мен құю шүмегі арасындағы құлыптау механизмі сенімді соруды және қыздыруды қамтамасыз етеді.

6. Дұрыс сәйкестікті қамтамасыз ету үшін Nipple Measurement Card пайдаланып, сәйкес өлшемдегі кірістіруді таңдаңыз және оны фланец туннеліне орналастырыңыз.

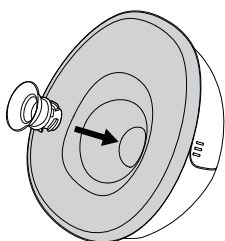

💡 Өлшемдік кірістірулер бөлек сатылады.
<https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>

Киіп жүру




Екі критерий сізге сүт сорғыштың дұрыс орналасқанын анықтауға көмектеседі:

- Сіз сүтті шығарып алатын айқын соруды сезесіз бе?
- Оны кию ыңғайлы ма?


Егер кию позициясы осы критерийлердің ешқайсысына сәйкес келмесе, сорғының орнын реттеуіңіз қажет.

Сіздің денеңіз жаңа сорғыға бейімделу үшін біраз уақыт қажет етеді, сондықтан басында нәтижелер жақсы болмаса, көңіліңізді түсірмеңіз.

1. Сәл алға еңкейіп, емізктің фланец туннелінің ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз. Сүт сорғышты кеудеңізге нық басып қою керек.

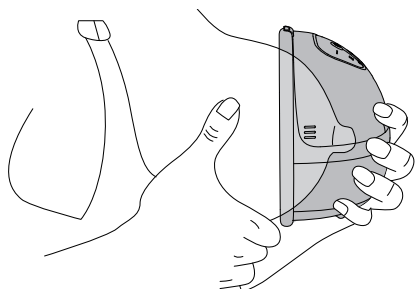

2. Толық жабылатын, қақпақты емізетін лифчикті қолданып, кеудеңіз бен фланец арасында тығыз тығыздағыш жасаңыз.

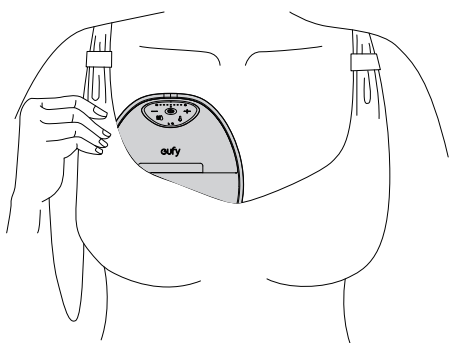

Пайдалану



Ағып кетудің алдын алу үшін:

- Сіз құрастыруды аяқтаған кезде, фланецтің сыртқы сақинасының толықтай тығыздалғанын қайтадан тексеріңіз.
- Сіздің емізігіңіз фланец туннелінің ортасында екеніне көз жеткізіңіз және кеудеңіз бен фланец арасында тығыз байланыс жасау үшін толық жабылатын емізу лифін қолданыңыз.
- Сорғыны пайдалану кезінде артқа сүйенбеңіз. Сеанс аяқталғаннан кейін сорғыны алу үшін алға еңкейіңіз.

Сору күші сезілмей ме немесе өнімділік мүлдем жоқ па, әлде өте аз ба?

- Үйрек тұмсықты клапан мен диафрагманы зақымдануларға, соның ішінде жарықтар, сынықтар, тесіктер немесе жыртылуларға тексеріңіз. Егер бөлшек зақымдалса, пайдалануды тоқтатып, ауыстыруға арналған жаңа бөлшекті сатып алыңыз.
- Төрт бөліктің (үйрек тұмсықты клапан, фланец туннелі, диафрагма және сорғы хабы) дұрыс құрастырылғанын және олардың толықтай тығыздалғанын тексеріңіз.
- Киіп тұрған орнын реттеңіз, емізік фланец туннелінің ортасында екеніне, сорғының көкірегіңізге тығыз жабысқанына және айқын сорылуды сезетініңізге көз жеткізіңіз.
- Әртүрлі фланец немесе кірістіру өлшемдерін қолданып көріңіз.
- Әртүрлі сорғыштар мен ырғақтарды қолданып көріңіз.



Тиісті жылыту үшін:

- Жылыту түйреуіштерін контейнердің сопақша ойығына мықтап басыңыз.
- Сорғы хабы мен диафрагма арасындағы саңылауды тығыздаңыз.
- Теріге тітіркену тудырмайтын, өзіңізге ең қолайлы жылу деңгейі мен ұзақтығын анықтаңыз.

Басқару түймелері


	Басыңыз және 2 секунд бойы ұстаңыз	Сүт сорғышты қосу / өшіру • Сүт сорғысы 30 минут бойы сүт сорғаннан кейін немесе 10 минутқа тоқтағаннан кейін автоматты түрде өшеді.
	Басыңыз	Тоқтату / Жалғастыру

	Басыңыз	Стимуляция режимі мен Сору режимі арасында ауысу • Стимуляция режимі: Бұл режимде сүт сорғыш құрылғысы сүттің ағуын бастау үшін жылдам және қысқа сорғыш үлгісін қолданады. • Сору режимі: Бұл режимде сүт сорғыш баяу сору үлгісімен басталады, сүтті тереңірек және баяу сорып шығарады.
	Басыңыз	Жылытуды Қосу / Өшіру
	Басыңыз	Сору / Жылу деңгейін арттыру / төмендету (Жылу деңгейін реттеу үшін алдымен жылыту батырмасын басыңыз.)
	Бір уақытта 2 секунд бойы басып тұрыңыз.	Қосымшадағы L/R жұптастыру

Жарық индикаторлары		
	Тұрақты қызыл	Батарея деңгейі <20%
	Жыпылықтаған қызыл	Батарея деңгейі <10%
	Ақ	Стимуляция / Сору режимінде
	Тұрақты қызғылт сары	Жылыту режимінде
	Жыпылықтаған қызғылт сары	Жылыту қатесі Фланец пен сорғы түйінін қайта жинап, жылыту түйреуіштерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	1-ден 7-ге дейінгі индикаторлар Ақ / Қызғылт сары	Сору деңгейі: 1-ден 7-ге дейін Жылу деңгейі: 1-ден 3-ке дейін
L R	L / R көрсеткіші Ақ	Сол жақ / Оң жақ жақтары қолданбада жұптастырылған


Сүтті тасымалдау

1. Сүт сорғышты тоқтатыңыз немесе өшіріңіз. Сорғыны шығарып жатқанда ағып кетудің алдын алу үшін алға еңкейіңіз.

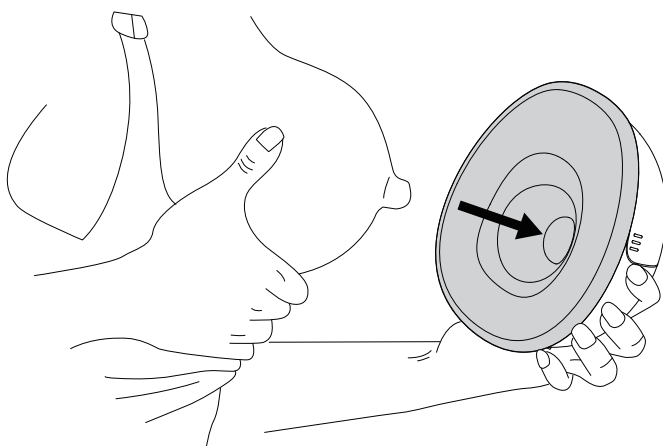


2. Сорғы хабын контейнерден алыңыз. "Бөлшектеу" 1-қадамға жүгініңіз.


⚠ Сүтті тасымалдаудан бұрын ағып кетудің алдын алу үшін сорғы хабынан басқа бөліктерді (диафрагманы қоса алғанда) бөлшектемеңіз.

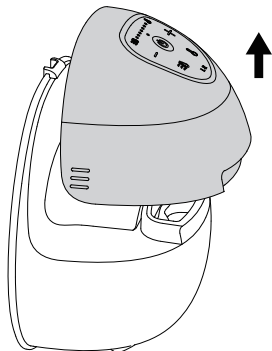

3. Контейнерді үстелге қойып, тасымалдауға дайын күйде қалдырыңыз.

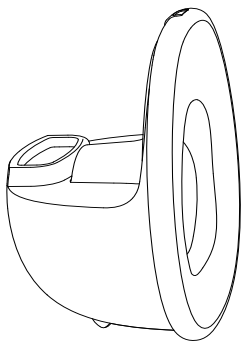

4. Контейнерді сүтті құю үшін фланеці жоғары қаратып еңкейтіңіз. Құю шүмегі төмен қараған кезде, толық босату үшін одан әрі еңкейтіңіз. Соңында, қажет болса, оның астында жиналып қалған сүтті алу үшін диафрагманы алып тастаңыз.

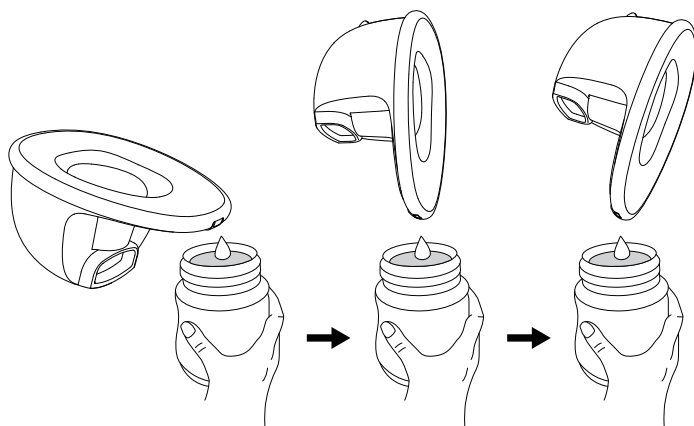

Қосымшаны жүктеу (міндетті емес)

Eufy Baby қосымшасын жүктеп алып, орнатыңыз, содан кейін жүйеге кіріңіз немесе тіркелгі жасаңыз. Құрылғыны қосып, баптауды аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. 2025 жылы eufy өнімдерін пайдалану тәжірибесін жақсарту үшін қолданыстағы eufy Baby қолданбасы eufy қолданбасымен ауыстырылады.



Өндіруші

Manufacturer: Shenzhen TPN Technology Co., Ltd.

Мекенжай: Лянчуан технологиялық паркі, 29-ғимарат, 2-қабат, 203-бөлме,
No. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Шэньчжэнь, Қытай 518000

Тұтынушыларға қызмет көрсету



Сорғы хабына 12 айлық шектеулі кепілдік
Жуылатын бөлшектерге 3 айлық шектеулі кепілдік

(US/CA) +1 (800) 988 7973

(UK) +44 (0) 1604 936200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(Қытай) +86 400 0550 036

(Жапония) 03 4455 7823

(AU) +61 3 8331 4800

(Египет) +20 8000000826

(UAE) +971 8000320817

(Кувейт) +965 22069086

(KSA) +966 8008500030



support@eufy.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial